

Aktivátor BJ Enabler Socket+ stručný průvodce

Popis zařízení

Spínaná síťová zásuvka BJ Enabler Socket+ přijme signál z dálkového ovladače systému BJ nebo z připojeného spínače a na tento pokyn zapne či vypne připojený spotřebič (např. světlo, topení, větrák, přístroj v kuchyni, audio přehrávač) nebo přístroj ovladatelný spínačem.




Nastavení a instalace

Ovládání dálkovým ovladačem systému BJ:

1. Podle tabulky 1 nastavte kód na voliči kódu RF.
2. Zapojte aktivátor BJ Enabler Socket+ do síť.zásuvky.
3. Na příslušném dálkovém ovladači systému BJ nastavte kód RF zvolený v kroku 1 (podle návodu k ovladači).
4. Připojte spotřebič do zásuvky BJ Enabler Socket+ nebo spotřebič ovladatelný spínačem do konektoru spínač-výstup. Respektujte přitom techn. údaje aktivátoru a ujistěte se, že spotřebič je zapnutý.
5. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko s kódem RF nastaveném v kroku 3 a spotřebič aktivujte. Po každém stisku se zásuvka zapne po dobu nastavenou na voliči funkcí podle tabulky 2 .

Ovládání spínačem zapojeným do konektoru spínač-vstup: Po každém stisku spínače se zásuvka zapne po dobu nastavenou na voliči funkcí podle tabulky 2 .

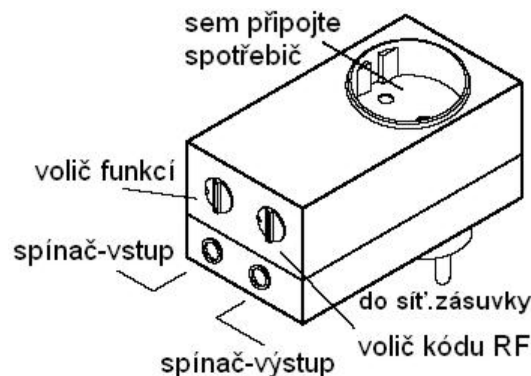

Pozor při změně nastavení

Když na voliči kódu RF nastavíte jinou pozici, musíte aktivátor BJ Enabler Socket+ odpojit od sítě alespoň na dobu 5 sec. Nový kód se uloží po opětovném připojení aktivátoru do sítě.

Technické údaje

- Napájení: stř. 230V / 50Hz (max. 250V)
- Pracovní radiová frekvence: 433MHz
- Rozměry: 105 x 59 x 50 mm
- 2x konektor 3,5 mono jack (1x vstup, 1x výstup)
- Max.zátěž: odporová 2000W/9A (cosφ=1); indukční 1000W/5,5A (cosφ=0,8); halogen+trafo 300W/1,7A (cosφ=0,76)
- Max.zátěž v konektoru spínač-výstup: 24V/1A



Poznámka: Když potřebujete nezávisle ovládat více aktivátorů z jednoho dálkového ovladače, stačí jenom na voliči kódu RF každého aktivátoru nastavit jinou hodnotu.

Zařízení používejte jen pro účel, pro který bylo vyrobeno, a ve shodě s návodem!

Moderní kompenzační pomůcky: SPEKTRA v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4
tel. 241774674-5, GSM 731522864, info@spektra.eu, www.spektra.eu

Údržba

- Zařízení uchovávejte v suchu. Při čištění zařízení používejte měkkou utěrku a nepoužívejte chemikálie, čisticí prostředky ani rozpouštědla. Čistěte jen zařízení odpojené od sítě!
- Zařízení nerozdělávejte, neupravujte ani neopravujte. Jakékoli změny nebo neautorizovaná oprava může způsobit úraz. S požadavkem na opravu se obraťte na prodejce zařízení.

Záruka

V záruční době výrobce provede bezplatně opravu zařízení nebo výměnu, pokud výrobek vykazuje vady materiálu nebo vady vzniklé při výrobě. Neautorizované zásahy do výrobku nebo jeho úpravy zbavují výrobce ručebního závazku.

Prohlášení o shodě

Výrobek splňuje podstatné požadavky směrnice 2004/108/EC a 2006/95/CEE.

Prohlášení o shodě lze stáhnout ze stránky výrobku na www.bjliveat.com.

Podpora a servis

Potřebujete-li poradit, jak výrobek instalovat nebo jak s ním zacházet, obraťte se prosím na distributora nebo na prodejce výrobku.

Distribuce a autorizovaný servis: Spektra v.d.n., Zátíšská 1914/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Tel.: 241763416, 241774675; e-mail: info@spektra.eu

Internet: www.spektra.eu

Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212 (www.remasystem.cz).



Výrobce: BJ Adaptaciones, C/ Mare de Déu del Coll, 70, Bajos, 08023 Barcelona, Španělsko

Tel.: +34 93 285 04 37; email: info@bjliveat.com

Internet: www.bjliveat.com

Tabulka 1				Tabulka 2	
Volič kódu RF	Kód „zapni“	Kód „vypni“	Kód „časovače“	Volič funkcí	Doba sepnutí
0	74	58	28	0	zamčeno
1	75	59	29	1	1 sec
2	76	60	30	2	2 sec
3	77	61	31	3	3 sec
4	78	62	32	4	5 sec
5	79	63	33	5	10 sec
6	80	64	34	6	15 sec
7	81	65	35	7	30 sec
8	82	66	36	8	45 sec
9	83	67	37	9	60 sec
A	84	68	38	A	1 min 30 sec
B	85	69	39	B	2 min
C	86	70	40	C	2 min 30 sec
D	87	71	41	D	3 min
E	88	72	42	E	4 min
F	89	73	43	F	5 min

Přejeme příjemnou a pohodlnou práci s aktivátorem BJ Enabler Socket+ !

Moderní kompenzační pomůcky: SPEKTRA v.d.n., Zátíšská 1914/1, 143 00 Praha 4
tel. 241774674-5, GSM 731522864, info@spektra.eu, www.spektra.eu