



Bierley

MonoMouse RM-TV **ColorMouse RM-TV**

Upozornění: Příklad nerozebírejte! Přívodní kabel násilně neohýbejte a vedte jej tak, aby po něm nikdo nešlapal ani lupu neshodil.

- Než začnete lupu používat, připojte síťový adaptér do elektrické sítě a jeho opačný konec do konektoru na kabelu lupy.
- Zapojte konektor SCART do příslušného konektoru na televizoru.
- Ujistěte se, že lupa-myš Bierley leží na nějakém textu.
- Zapněte televizor a stiskněte velké modré tlačítko na přední straně lupy.
- Pohodlně se usadte a můžete začít číst.
- Režim čtení v negativu (bílý text na černém pozadí) přepnete do fotorežimu stiskem malého kulatého tlačítka na zadní straně přístroje (nedaleko přívodního kabelu). Dalším stiskem tlačítka přepnete do režimu čtení v pozitivu (černé písmo na bílém pozadí) a dalším stiskem se vrátíte do negativu. Režimy pozitiv a negativ mají zvýšený kontrast, fotorežim (černobílý s lupou MonoMouse, barevný s lupou ColorMouse) ukazuje plnou škálu odstínů podle originálu a je vhodný pro prohlížení obrázků (fotografií) nebo čtení předloh horší kvality.

Příklad je testován podle direktivy 73/23/EEC a dodatku 93/68/EEC pro nízkonapěťová zařízení a má značku shody CE.

Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212

(www.remasystem.cz).

Výrobní číslo přístroje:

