

Bierley

ColorMouse / ColorMouse-Zoom návod k obsluze barevné elektronické lupy

Vážený uživateli,

rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení lupy Bierley, která za přijatelnou cenu nabízí funkčnost i ergonomii. Tato elektronická lupa je vybavena režimem MD - režimem se zvýšeným kontrastem kompenzujícím makulární degeneraci. Přejeme příjemnou a spokojenou práci s lupou.



ColorMouse



ColorMouse-Zoom

- Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky a do lupy.
- Zapojte konektor SCART do televizoru.
- Lupu položte na text.
- Zapněte televizor a stiskněte velké modré tlačítko vpředu na lupě.
- Pohodlně se usadte a čtěte.


Přepínání režimů

Vyzkoušejte si negativní režim MD (bílý text na černém pozadí) – pro mnoho uživatelů je takový text čitelnější.

ColorMouse: Režimy přepínáte kulatým tlačítkem vzadu na lupě (vedle kabelu).

ColorMouse-Zoom: Režimy přepínáte prostředním tlačítkem nahoře na lupě.

Opakovanými stisky přepínáte režimy v pořadí

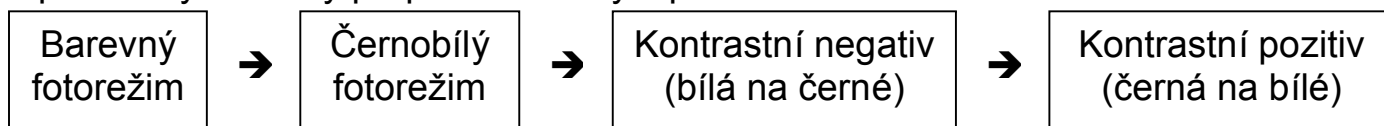

a zpět do barevného fotorežimu.

Zvětšování

Pokud máte model ColorMouse-Zoom, můžete si navíc nastavit velikost zvětšení. Zvětšujete pravým tlačítkem nahoře na lupě, zmenšujete levým tlačítkem.

Pozn.: U modelu ColorMouse velikost zvětšení měnit nelze.

Upozornění: Příklad nerozebírejte! Přívodní kabel násilně neohýbejte a vedte jej tak, aby po něm nikdo nešlapal ani lupu neshodil.

Shoda: Příklad je testován podle direktivy 73/23/EEC a dodatku 93/68/EEC pro nízkonapěťová zařízení a má značku shody CE.

Výrobce: Bierley.com Ltd., Vel.Británie; www.bierley.com



Moderní kompenzační pomůcky:

Spektra v.d.n., Zátěšská 1914/1, Praha 4; info@spektra.eu, www.spektra.eu

Bierley

MonoMouse / MonoMouse-Zoom návod k obsluze černobílé elektronické lupy

Vážený uživateli,

rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení lupy Bierley, která za přijatelnou cenu nabízí funkčnost i ergonomii. Tato elektronická lupa je vybavena režimem MD - režimem se zvýšeným kontrastem kompenzujícím makulární degeneraci. Přejeme příjemnou a spokojenou práci s lupou.



MonoMouse



MonoMouse-Zoom

- Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky a do lupy.
- Zapojte konektor SCART do televizoru.
- Lupu položte na text.
- Zapněte televizor a stiskněte velké modré tlačítko vpředu na lupě.
- Pohodlně se usadte a čtěte.


Přepínání režimů

Vyzkoušejte si negativní režim MD (bílý text na černém pozadí) – pro mnoho uživatelů je takový text čitelnější.

MonoMouse: Režimy přepínáte kulatým tlačítkem vzadu na lupě (vedle kabelu).

MonoMouse-Zoom: Režimy přepínáte prostředním tlačítkem nahoře na lupě.

Opakovanými stisky přepínáte režimy v pořadí

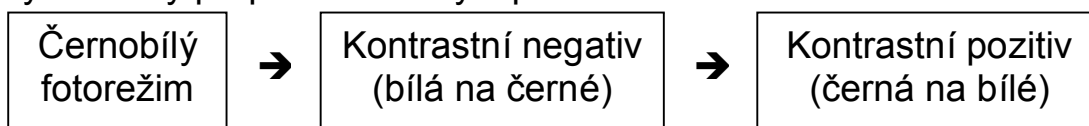

a zpět do černobílého fotorežimu.

Zvětšování

Pokud máte model MonoMouse-Zoom, můžete si navíc nastavit velikost zvětšení. Zvětšujete pravým tlačítkem nahoře na lupě, zmenšujete levým tlačítkem.

Pozn.: U modelu MonoMouse velikost zvětšení měnit nelze.

Upozornění: Příklad nerozebírejte! Přívodní kabel násilně neohýbejte a vedte jej tak, aby po něm nikdo nešlapal ani lupu neshodil.

Shoda: Příklad je testován podle direktivy 73/23/EEC a dodatku 93/68/EEC pro nízkonapěťová zařízení a má značku shody CE.

Výrobce: Bierley.com Ltd., Vel.Británie; www.bierley.com



Moderní kompenzační pomůcky:

Spektra v.d.n., Zátěšská 1914/1, Praha 4; info@spektra.eu, www.spektra.eu