

Návod ke spínačům BigRed® - JellyBean® - Specs®

Spínače jsou určeny lidem, kteří mají problémy s jemnou motorikou a

- potřebují ovládat počítač a nemohou psát na normální klávesnici,
- potřebují spínačem ovládat některé elektrospotřebiče, hračky nebo komunikátory.

Bezpečnostní pokyny

- Před připojením k elektrospotřebičům, hračkám nebo komunikátorům si nejprve přečtěte návod k těmto zařízením (spínače lze připojovat jen k některým takovým zařízením a jen předepsaným způsobem).
- Když zařízení umístíte blízko uživatele, čiňte tak opatrně, zejména pokud zařízení má pohyblivé části nebo vyzařuje teplo.
- Nikdy spínače nepoužívejte k ovládní zařízení, která se nacházejí pod vodou.

Údržba

Před čišťením odpojte spínač od zařízení. Čistěte jej vlhkou utěrkou, můžete použít slabý mýdlový roztok. **Pozor: Neponořujte spínač do vody. Spínač neotvírejte.**

