

## Seznam příkazů lupy ClearNote a ClearNote+

<b>Příkaz</b>	<b>Kláves.kombinace</b>
Nápověda: klávesové zkratky	H (zavřete ALT+F4)
Lišta nástrojů ClearNote	CTRL + B
Zvětšit	Šipka nahoru
Zmenšit	Šipka dolů
Celá obrazovka / maximalizovat	F (přepínač)
Minimalizovat okno	ALT + mezera (kontextové menu)
Změnit velikost okna	CTRL + šipky
Přemístit okno	SHIFT + šipky
Aktivovat okno ClearNote (přepíná aplikace)	ALT + TAB
Režim (pozitiv / negativ / foto)	M
Semicolor	S (zapne/vypne)
Semicolor: další barva	SHIFT + S
Zvýšit jas	B
Snížit jas	SHIFT + B
Zvýšit kontrast	C
Snížit kontrast	SHIFT + C
Zvýšit sytost barev	X
Snížit sytost barev	SHIFT + X
Reset (návrat k továrnímu nastavení)	CTRL + R
Vodící linka	L
Posunout vodící linku	PgUp, PgDn
Uložit aktuální obraz (standardní dialog)	CTRL + S
Otevřít uložený obraz (standardní dialog)	CTRL + O
Uložit aktuální obraz přímo (max. 10)	SHIFT+0,...,SHIFT+9
Otevřít uložený obraz přímo (max. 10)	0,1,...,9 (z 1.řady)
Zavřít obraz (okno)	ALT + F4
Překlopit video svisle	CTRL + M
Překlopit video vodorovně	SHIFT + M
Autofokus	CTRL + A (přepínač)
Umístit video okno do rohu	W (když neběží zvětšovací program)
Prokládaně	I (přepínač)

*(platí pro verzi 7 a vyšší)*

## Klávesové zkratky se zvětšovacím programem

<b>Příkaz</b>	<b>Kláves.kombinace</b>
<b>Umístění video okna v dělené obrazovce</b>	<b>D</b> (přepínač)
<b>Změnit velikost video okna v dělené obrazovce</b> (posunuje dělicí linii)	<b>CTRL + šipky</b> (svisle dělené pravou-levou šipkou; vodorovně dělené šipkou nahoru-dolů)
<b>Minimalizovat okno ClearNote</b>	<b>T</b> (přepínač)

*(platí pro verzi 7 a vyšší)*