

Návod ke komunikátoru GoTalk 4+ / GoTalk 9+ / GoTalk 20+



Baterie a zapnutí přístroje

Použijete dvě baterie AA. Křížovým šroubovákem odšroubujete dvířka bateriového prostoru (viz obr. vpravo „pohled ze zadu“) a vložíte baterie. Přístroj zapnete hlavním vypínačem OFF/ON (zapnutý v poloze ON).

Interpretovatelné klávesy

Nahrávání zpráv k interpretovatelným klávesám

Zapněte komunikátor - po zapnutí uslyšíte pípnutí!

Stiskněte a uvolněte tlačítko nahrávání: svítí zelená LED dioda označující číslo vrstvy záznamu a červená LED dioda indikující režim nahrávání. Potom stiskněte a uvolněte tu interpretovatelnou klávesu, k níž chcete zprávu nahrát. Při stisku klávesy začne červená dioda blikat a komunikátor nahrává vše, co říkáte do mikrofonu.


Nahrávání zprávy ukončíte stiskem jakékoli klávesy. Pokračujete nahráváním dalších zpráv pro další klávesy, případně v ostatních vrstvách. Když jste nahráli všechny zprávy (ve všech vrstvách), stiskněte a uvolněte tlačítko záznamu – ukončíte tak režim nahrávání.

Přehrávání

Krátce stiskněte interpretovatelnou klávesu: zelená dioda začne blikat a přehraje se zaznamenaná zpráva.

Pohled ze zadu

Tlačítko záznamu

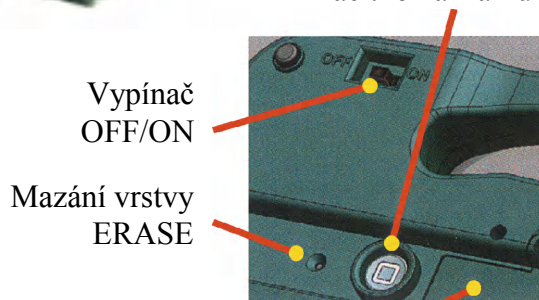

Prostor pro baterie (pod šroubkem)

Vrstvy

Stiskem tlačítka pod sloupečkem zelených diod změníte vrstvu záznamu. Bliká zelená dioda u čísla aktuální vrstvy. Dalším stiskem přejdete k další vrstvě. Vyměníte obrázkový list za list odpovídající nové vrstvě. Zprávy nahrané v určité vrstvě vymažete takto: Stiskněte a uvolněte tlačítko záznamu vzadu na přístroji. Nastavte vrstvu, kterou chcete vymazat (zeleně svítí dioda u čísla mazané vrstvy). Potom propiskou nebo sponkou stiskněte tlačítko ERASE. Vymažete všechny zprávy v dané vrstvě. Stejným postupem můžete vymazat další vrstvy. Tlačítkem ERASE nevymažete hlavní fráze pod hlavními klávesami.

Zámky

Uzamčení zabrání nechtěné akci při stisku tlačítka vrstvy nebo záznamu.

- Zámek vrstvy — vrstvu uzamknete takto: Stiskněte a podržte tlačítko záznamu vzadu na přístroji. Svítí červená a zelená dioda. Při stále stisknutém tlačítku záznamu, stiskněte a uvolněte tlačítko pro snížení hlasitosti (tlumeněji). Obě diody přestanou svítit, takže víte, že vybraná vrstva je uzamčena.
- Zámek záznamu — záznam uzamknete takto: Stiskněte a podržte tlačítko záznamu vzadu na přístroji. Svítí červená a zelená dioda. Při stále stisknutém tlačítku záznamu stiskněte a uvolněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti (hlasitěji). Obě diody přestanou svítit, takže víte, že záznam je uzamčený.

Záznam i vrstvu odemknete takto: Komunikátor vypnete. Pak podržte tlačítko záznamu a komunikátor zapnete při stále stisknutém tlačítku záznamu. Na jednotlivých vrstvách se postupně rozsvěčují zelené diody a červená dioda se krátce rozsvítí a pípne.

Hlavní fráze

Řada hlavních kláves

Postupujte podle návodu pro nahrávání (viz výše). Hlavní fráze zůstávají stejné ve všech vrstvách, dokud je nepřehrajete frází novou.

K hlavním klávesám byste měli nahrát fráze, které se při komunikaci často používají, např. pozdravy, obecné otázky nebo základní potřeby. Hlavní fráze je dostupná v každé vrstvě.

Příklady hlavních frází: dobrý den, nashledanou, prosím, děkuji, ano, ne.

Tvorba výměnných listů

Rastr kláves na internetu

Na internetové adrese www.spektra.eu si stáhnete rastr kláves odpovídající verzi komunikátoru GoTalk, kterou používáte. Rastr kláves je stránka A4 ve formátu Word (.doc) s vyznačeným rozložením kláves. Do rastru vložte v počítači vlastní obrázky nebo text a vytisknete. Pak oříznete podle vyznačeného obvodu na potřebnou velikost.

Úschovna výměnných listů

Pro každou vrstvu si zhotovíte jeden obrázkový list, listy skladujete v prostoru pro úschovu výměnných listů. Při změně vrstvy obrázkový list vyměníte: starý vrátíte do úshovny a z úshovny založíte patřičný nový list.

Verze komunikátoru GoTalk

GoTalk 4+	GoTalk 9+	GoTalk 20+
2 hlavní a 4 interpret.klávesy Záznam celkem: 4,6 min (274 sec) Rozměry: 30 x 22,5 x 2 cm	3 hlavní a 9 interpret.kláves Záznam celkem: 8,5 min (510 sec) Rozměry: 30 x 22,5 x 2 cm	5 hlavních a 20 interpret.kláves Záznam celkem: 15 min (900 sec) Rozměry: 30 x 22,5 x 2 cm

Příklady využití komunikátoru

- Pro komunikaci s nemluvicími, u kterých se budují komunikačních dovedností
- Pro komunikaci v cizím, neznámém jazyku