

Návod ke komunikátoru GoTalk One

Založení obrázku

Zhotovte si obrázek (4,7 x 8,2 cm), který charakterizuje nahrávanou zprávu. Vytáhněte směrem nahoru kryt na horní straně přístroje, který obrázek zajišťuje. Založte obrázek a zasuňte kryt zpět.

Záznam zprávy

1. Posuvný přepínač na zadní straně přístroje posuňte do polohy REC.
2. Podržte mikrofon MIC na přední straně ve vzdálenosti asi 15 cm před ústy.
3. Stiskněte a držte zlaté čtvercové tlačítko PLAY > na přední straně, rozsvítí se červená LED.
4. Do mikrofonu nad kontrolkou řekněte zprávu. Na konci zprávy uvolněte tlačítko PLAY >. Lze zaznamenat zprávu v trvání do 10 sec. Záznamem další zprávy přepíšete zprávu původní.
5. Přepínač na zadní straně vraťte do polohy PLAY. Zprávu si tak nechtěně nevymažete.

Přehrávání

Stiskem tlačítka PLAY > na přední straně přehrajete zaznamenanou zprávu.

Vymazání zprávy

1. Posuvný přepínač na zadní straně přístroje posuňte do polohy REC.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko PLAY > na přední straně.

Výměna baterií

V přístroji jsou dvě knoflíkové baterie AG13. Když reprodukce slábne, baterie vyměňte. Zpráva zůstává zaznamenaná i při vybitých bateriích. Postup při výměně:

1. Šroubovákem odšroubujte dvířka OPEN bateriového prostoru na zadní straně přístroje.
2. Dvířka vysuňte a vyměňte baterie (pólem '+' nahoru).
3. Zasuňte a zašroubujte dvířka bateriového prostoru.

Moderní kompenzační pomůcky: Spektra v.d.n., Zátěšská 915/1, Praha 4; info@spektra.eu, www.spektra.eu

Návod ke komunikátoru GoTalk One

Založení obrázku

Zhotovte si obrázek (4,7 x 8,2 cm), který charakterizuje nahrávanou zprávu. Vytáhněte směrem nahoru kryt na horní straně přístroje, který obrázek zajišťuje. Založte obrázek a zasuňte kryt zpět.

Záznam zprávy

1. Posuvný přepínač na zadní straně přístroje posuňte do polohy REC.
2. Podržte mikrofon MIC na přední straně ve vzdálenosti asi 15 cm před ústy.
3. Stiskněte a držte zlaté čtvercové tlačítko PLAY > na přední straně, rozsvítí se červená LED.
4. Do mikrofonu nad kontrolkou řekněte zprávu. Na konci zprávy uvolněte tlačítko PLAY >. Lze zaznamenat zprávu v trvání do 10 sec. Záznamem další zprávy přepíšete zprávu původní.
5. Přepínač na zadní straně vraťte do polohy PLAY. Zprávu si tak nechtěně nevymažete.

Přehrávání

Stiskem tlačítka PLAY > na přední straně přehrajete zaznamenanou zprávu.

Vymazání zprávy

1. Posuvný přepínač na zadní straně přístroje posuňte do polohy REC.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko PLAY > na přední straně.

Výměna baterií

V přístroji jsou dvě knoflíkové baterie AG13. Když reprodukce slábne, baterie vyměňte. Zpráva zůstává zaznamenaná i při vybitých bateriích. Postup při výměně:

1. Šroubovákem odšroubujte dvířka OPEN bateriového prostoru na zadní straně přístroje.
2. Dvířka vysuňte a vyměňte baterie (pólem '+' nahoru).
3. Zasuňte a zašroubujte dvířka bateriového prostoru.

Moderní kompenzační pomůcky: Spektra v.d.n., Zátěšská 915/1, Praha 4; info@spektra.eu, www.spektra.eu