

Návod k elektronické lupě

Maggie

Zapnout (pravá strana kolébky)
přesvědčte se, že tlačítko reset je zapnuté
(v poloze nahoru směrem k USB) a stiskněte a
podržte vypínač 2-3 sec.

Práce s lupou

Opřete lupu sPodržte lupu nad předlohou ve
výšce 2-3 cm a čtete. Čtete v osvětleném
prostředí - lupa nemá vlastní osvětlení.

Vypnout (pravá strana kolébky)

Stiskněte a podržte vypínač 2-3 sec. Když lupou
nečtete, vypněte ji – šetříte tak baterie.

Jas

Stiskem tlačítka obraz zjasníte nebo ztmavíte.

Režim


Stisky tlačítka přepínáte mezi barevným a
černobílým obrazem.

Zoom

Stisky tlačítka cyklicky přepínáte velikost zvět-
šení 4x, 6x, 8x, 11x a zpět 4x.

Momentka (levá strana kolébky)

Stiskem obraz zmrazíte a pohodlně prohlédnete.
Dalším stiskem se vrátíte do živého obrazu.

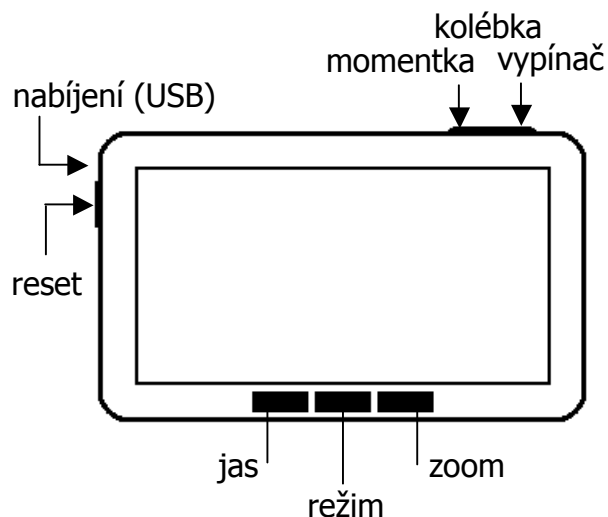

Zapnout (pravá strana kolébky)
přesvědčte se, že tlačítko reset je zapnuté
(v poloze nahoru směrem k USB) a stiskněte a
podržte vypínač 2-3 sec.

Práce s lupou

Podržte lupu nad předlohou ve výšce 2-3 cm a
čtete. Čtete v osvětleném prostředí - lupa nemá
vlastní osvětlení.

Vypnout (pravá strana kolébky)

Stiskněte a podržte vypínač 2-3 sec. Když lupou
nečtete, vypněte ji – šetříte tak baterie.

Jas

Stiskem tlačítka obraz zjasníte nebo ztmavíte.

Barvy

Stisky tlačítka přepínáte mezi barevným a
černobílým obrazem.

Zoom


Stisky tlačítka cyklicky přepínáte velikost zvět-
šení 4x, 6x, 8x, 11x a zpět 4x.

Momentka (levá strana kolébky)

Stiskem obraz zmrazíte a pohodlně prohlédnete.
Dalším stiskem se vrátíte do živého obrazu.

Návod k elektronické lupě

Maggie

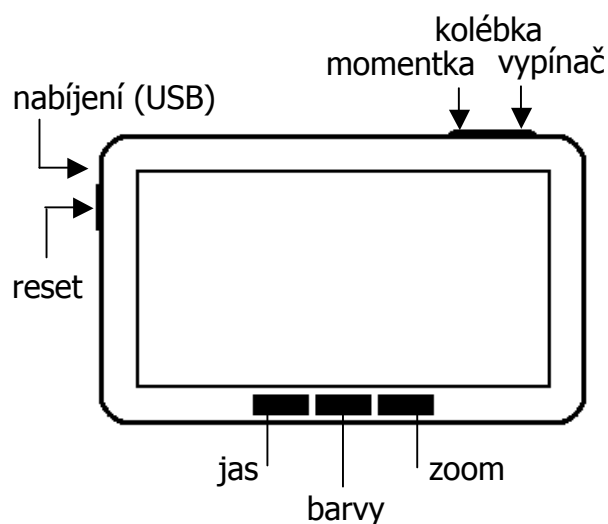

Reset

Potřebujete-li obnovit tovární nastavení, posuňte tlačítkem dolů a zpátky nahoru.

Nabíjení

Připojte dodávaný kabel USB na jedné straně do nabíjení (USB) v lupě a druhým koncem do počítačového portu USB nebo do dodávaného síťového adaptéru s výstupem USB. Při nabíjení se lupa sama zapne – nevypínejte ji, jinak se baterie nenabíjí. Úplná doba nabíjení 3 hodiny.

Prohlášení o shodě

Zařízení nese značku shody CE; vyhovuje normě EN 60601-1-4.



Distribuce a servis v ČR

Spektra v.d.n., Zátěšská 1914/1, Praha 4
Tel. 241 774 674-5, GSM 731 522 864
info@spektra.eu, www.spektra.eu

Výrobce: Bierley.com Ltd, Velká Británie

Těšte se z práce s lupou a povězte o přístroji svým známým.

Dbejte na bezpečnost

Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.

Přístroj neupust'te a ani jinak jej mechanicky nepoškod'te.

Přístroj neotvírejte ani neodstraňujte žádné jeho části. Opravu svěřte pověřenému servisu.

Nevystavujte přístroj vlhkosti, působení chemikálií či jiných tekutin.

Přístroj opatrně čistěte navlhčenou měkkou utěrkou a pouze zevně čistícími nebo mycími přípravky můžete přístroj nebo optiku poškodit. Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě.

Nepracujte s lupou v blízkosti nedostatečně odstíněných elektrických zařízení.

Používejte jen dodávaný síťový adaptér.

Pokud byste se při práci s lupou neřídili tímto návodem, mohli byste přístroj poškodit a ztratit nárok na záruční opravu.

Reset

Potřebujete-li obnovit tovární nastavení, posuňte tlačítkem dolů a zpátky nahoru.

Nabíjení

Připojte dodávaný kabel USB na jedné straně do nabíjení (USB) v lupě a druhým koncem do počítačového portu USB nebo do dodávaného síťového adaptéru s výstupem USB. Při nabíjení se lupa sama zapne – nevypínejte ji, jinak se baterie nenabíjí. Úplná doba nabíjení 3 hodiny.

Prohlášení o shodě

Zařízení nese značku shody CE; vyhovuje normě EN 60601-1-4.



Distribuce a servis v ČR

Spektra v.d.n., Zátěšská 915/1, Praha 4
Tel. 241 774 674-5, GSM 731 522 864
info@spektra.eu, www.spektra.eu

Výrobce: Bierley.com Ltd, Velká Británie

Těšte se z práce s lupou a povězte o přístroji svým známým.

Dbejte na bezpečnost

Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.

Přístroj neupust'te a ani jinak jej mechanicky nepoškod'te.

Přístroj neotvírejte ani neodstraňujte žádné jeho části. Opravu svěřte pověřenému servisu.

Nevystavujte přístroj vlhkosti, působení chemikálií či jiných tekutin.

Přístroj opatrně čistěte navlhčenou měkkou utěrkou a pouze zevně – čistícími nebo mycími přípravky můžete přístroj nebo optiku poškodit. Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě.

Nepracujte s lupou v blízkosti nedostatečně odstíněných elektrických zařízení.

Používejte jen dodávaný síťový adaptér.

Pokud byste se při práci s lupou neřídili tímto návodem, mohli byste přístroj poškodit a ztratit nárok na záruční opravu.