

**Zapnout / vypnout** (pravá strana kolébky):  
Stiskněte a podržte vypínač 2-3 sec.

**Osvětlení:** Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete osvětlení předlohy.


**Režim:** Přepínáte mezi barevným a černobílým obrazem; model MD má ještě kontrastní negativ.

**Zoom:** Přepínáte zvětšení 4x, 6x, 8x, 11x.


**Momentka** (levá strana kolébky): Stiskem obraz zmrazíte a pohodlně si jej prohlédnete. Dalším stiskem se vrátíte do živého obrazu.

### Lupou čtete jedním ze 3 způsobů:

1. Držíte v ruce nad předlohou ve výšce 2-3 cm

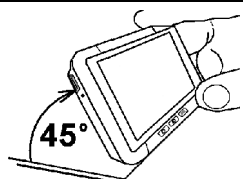


2. Opřete spodní hranou o předlohu a natočíte do 45°

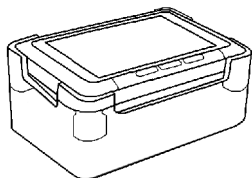

3. Umístíte do plastového stojánku a čtete

*Bierley*

## Návod k elektronické lupě Maggie Pro / Maggie MD

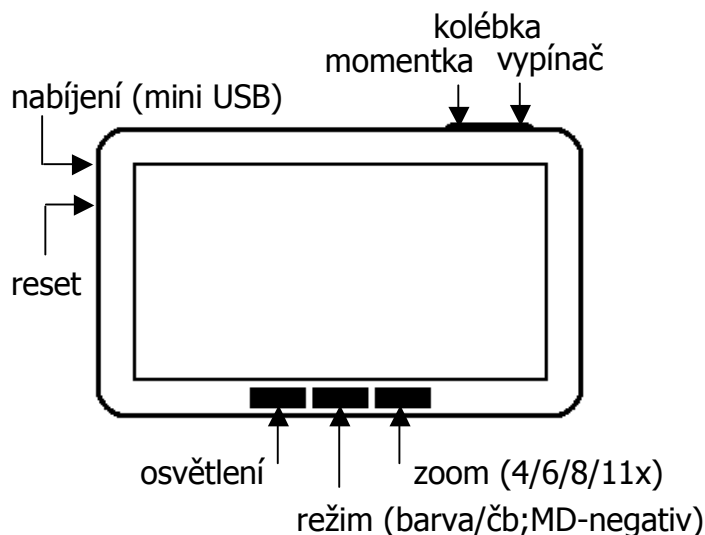

**Zapnout / vypnout** (pravá strana kolébky):  
Stiskněte a podržte vypínač 2-3 sec.

**Osvětlení:** Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete osvětlení předlohy.


**Režim:** Přepínáte mezi barevným a černobílým obrazem; model MD má ještě kontrastní negativ.

**Zoom:** Přepínáte zvětšení 4x, 6x, 8x, 11x.


**Momentka** (levá strana kolébky): Stiskem obraz zmrazíte a pohodlně si jej prohlédnete. Dalším stiskem se vrátíte do živého obrazu.

### Lupou čtete jedním ze 3 způsobů:

1. Držíte v ruce nad předlohou ve výšce 2-3 cm

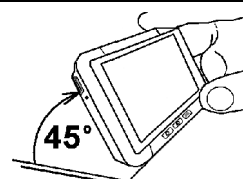


2. Opřete spodní hranou o předlohu a natočíte do 45°

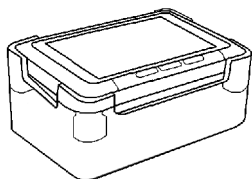

3. Umístíte do plastového stojánku a čtete

*Bierley*

## Návod k elektronické lupě Maggie Pro / Maggie MD

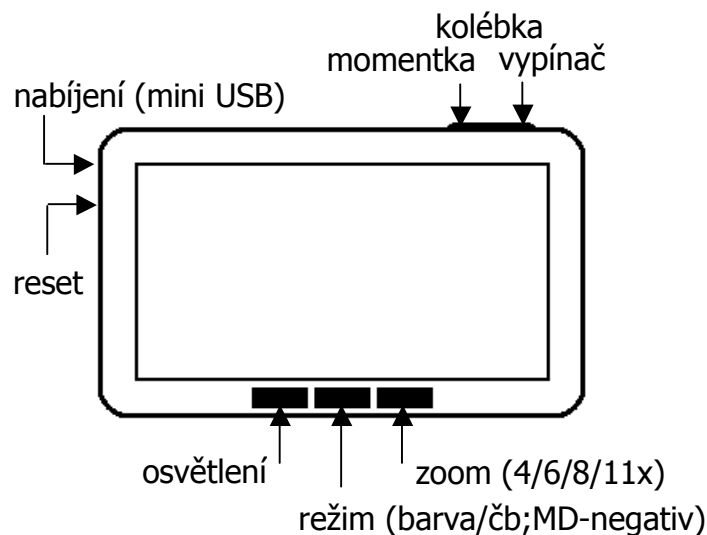

## Reset

Potřebujete-li obnovit tovární nastavení, zasuňte do otvoru pro reset tenkou špičku.

## Nabíjení aku baterií

Připojte dodávaný kabel USB na jedné straně do nabíjení v lupě (mini USB) a druhým koncem do počítačového portu USB nebo do dodávaného síťového adaptéru se vstupem USB. Při nabíjení se lupa sama zapne – nevypínejte ji, jinak se baterie nenabijí. Úplná doba nabíjení 3 hodiny.

## Prohlášení o shodě

Zařízení nese značku shody CE; vyhovuje normě EN 60601-1-4.



## Distribuce a servis v ČR

Spektra v.d.n., Zátěšská 1914/1, Praha 4  
Tel. 241 774 674-5, GSM 731 522 864  
info@spektra.eu, www.spektra.eu

**Výrobce:** Bierley.com Ltd, Velká Británie

**Těšte se z práce s lupou a povězte o přístroji svým známým.**

## Dbejte na bezpečnost

Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.

Přístroj neupust'te a ani jinak jej mechanicky nepoškod'te.

Přístroj neotvírejte ani neodstraňujte žádné jeho části. Opravu svěřte pověřenému servisu.

Nevystavujte přístroj vlhkosti, působení chemikálií či jiných tekutin.

Přístroj opatrně čistěte navlhčenou měkkou utěrkou a pouze zevně – čistícími nebo mycími přípravky můžete přístroj nebo optiku poškodit. Před čistěním přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě.

Nepracujte s lupou v blízkosti nedostatečně odstíněných elektrických zařízení.

Používejte jen dodávaný síťový adaptér.

Pokud byste se při práci s lupou neřídili tímto návodem, mohli byste přístroj poškodit a ztratit nárok na záruční opravu.

## Reset

Potřebujete-li obnovit tovární nastavení, zasuňte do otvoru pro reset tenkou špičku.

## Nabíjení aku baterií

Připojte dodávaný kabel USB na jedné straně do nabíjení v lupě (mini USB) a druhým koncem do počítačového portu USB nebo do dodávaného síťového adaptéru se vstupem USB. Při nabíjení se lupa sama zapne – nevypínejte ji, jinak se baterie nenabijí. Úplná doba nabíjení 3 hodiny.

## Prohlášení o shodě

Zařízení nese značku shody CE; vyhovuje normě EN 60601-1-4.



## Distribuce a servis v ČR

Spektra v.d.n., Zátěšská 915/1, Praha 4  
Tel. 241 774 674-5, GSM 731 522 864  
info@spektra.eu, www.spektra.eu

**Výrobce:** Bierley.com Ltd, Velká Británie

**Těšte se z práce s lupou a povězte o přístroji svým známým.**

## Dbejte na bezpečnost

Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.

Přístroj neupust'te a ani jinak jej mechanicky nepoškod'te.

Přístroj neotvírejte ani neodstraňujte žádné jeho části. Opravu svěřte pověřenému servisu.

Nevystavujte přístroj vlhkosti, působení chemikálií či jiných tekutin.

Přístroj opatrně čistěte navlhčenou měkkou utěrkou a pouze zevně – čistícími nebo mycími přípravky můžete přístroj nebo optiku poškodit. Před čistěním přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě.

Nepracujte s lupou v blízkosti nedostatečně odstíněných elektrických zařízení.

Používejte jen dodávaný síťový adaptér.

Pokud byste se při práci s lupou neřídili tímto návodem, mohli byste přístroj poškodit a ztratit nárok na záruční opravu.