

Compact⁺ HD

Uživatelská příručka

Verze 1.0

© 2014 Optelec, Nizozemí

Všechna práva vyhrazena



Optelec

P. O. Box 399

2990 AJ Barendrecht, Nizozemí

Tel: +31 (0)88 678 34 44

E-mail: info@optelec.nl

Web: www.optelec.com

 Spektra, 2015

Obsah

1. Úvod	4
O příručce	5
Součásti balení.....	5
2. Začínáme	6
Práce s lupou Compact+ HD s rukojetí nebo bez ní.....	7
Čištění zrcátka	7
3. Tlačítka	8
Zapnutí a vypnutí	9
Úprava zvětšení	9
Výběr režimu zobrazení	10
Tlačítko momentky	11
4. Nabíjení baterie.....	12
Nabíjení lupy Compact+ HD.....	12
Pohotovostní režim a automatické vypnutí.....	13
Varování před nízkým stavem baterie	13
5. Menu lupy Compact+ HD.....	14
Vstup do menu	15
Pohyb v menu	15
Opuštění menu.....	15
Menu: Information (informace)	16
Menu: Images (obrázky).....	16

Menu: Brightness (jas)	18
Menu: Power (napájení).....	19
Menu: Sound (zvuková signalizace).....	21
Menu: Color (barvy)	22
Menu: Reset (obnova výchozího nastavení)	23
Dodatek A: Bezpečnostní pokyny	24
Dodatek B: Technické údaje	25
Dodatek C: Prohlášení o shodě	26
Dodatek D: Záruční podmínky	27

1. Úvod

Blahopřejeme vám k výběru lupy Compact+ HD!

Tato jedinečná kamerová lupa společnosti Optelec vám umožní zvětšovat a prohlížet si tištěný text i obrázky ve vysokém rozlišení v barevném fotorežimu nebo v jednom z režimů s vysokým kontrastem.

Compact+ HD lze díky jeho víceúčelovému designu a integrované rukojeti používat ke čtení, prohlížení obrázků, cenovek, displejů a mnoha dalších věcí a to jak doma, tak na cestách.

Pokud budete mít k práci s touto lupou jakékoli dotazy či náměty, kontaktujte, prosím, svého prodejce nebo společnost Optelec, na kterou jsou uvedeny kontaktní informace na konci této příručky. Velmi uvítáme vaši odezvu a doufáme, že se vám s lupou Compact+ HD bude dobře pracovat!

O příručce

Ve společnosti Optelec neustále zlepšujeme naše produkty a jejich funkčnost. Proto je možné, že tato příručka není ta nejnovější. Aktuální verzi příručky si, prosím, stáhněte ze stránek www.optelec.com v části Support (v češtině z www.spektra.eu v části Ke stažení, pozn. překl.).

Příručka vás seznámí s ovládáním a základními funkcemi lupy Compact+ HD. Než začnete zařízení používat, pečlivě si, prosím, příručku přečtěte.

Součástí balení


Balení lupy Compact+ HD obsahuje následující součásti:

- Kamerovou lupu Compact+ HD
- Ochranný obal
- Napájecí adaptér
- Hadřík na čištění displeje
- Tuto uživatelskou příručku

Pokud jakákoli součást balení chybí, kontaktujte, prosím, svého prodejce.

2. Začínáme

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny hlavní součásti lupy Compact+ HD:

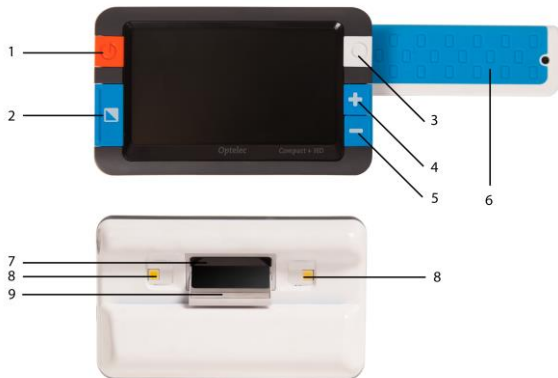

1. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí
2. Tlačítko režimů
3. Tlačítko momentky
4. Tlačítko zvětšení: plus (+)
5. Tlačítko zvětšení: minus (-)
6. Rukojeť
7. Kamera
8. LED diody
9. Zrcátko

Compact+ HD máte před sebou správně položený, když displej míří vzhůru a oranžové tlačítko pro zapnutí / vypnutí je od něj nalevo.

Práce s lupou Compact+ HD s rukojetí nebo bez ní

Compact+ HD je ideální pro rychlé prohlížení předmětů a dokumentů. Lupa má výklopnou rukojeť, díky které máte pocit, jako byste pracovali s běžnou skleněnou lupou. Rukojeť umístěnou na spodní straně zařízení prostě vyklopte ve směru hodinových ručiček, abyste ji uvolnili, a ona se zaklapne na správném místě. Tato výklopná rukojeť vám pomůže k co nejpohodlnějšímu čtení.



Se sklopenou rukojetí můžete Compact+ HD používat k rychlému prohlížení dokumentů a předmětů.



S vyklopenou rukojetí umístěte Compact+ HD na text nebo předmět, který chcete číst nebo prohlížet, a uchopte Compact+ HD za rukojeť, abyste jej mohli snadno přesouvat nad dokumentem či předmětem.

Čištění zrcátka

Pro optimální kvalitu obrazu doporučujeme udržovat zrcátko čisté. Špinavé zrcátko způsobuje rozmazaný obraz. K čištění zrcátka použijte přiložený čisticí hadřík či jiný měkký hadřík na čištění.

Poznámka: K čištění zrcátka nepoužívejte vodu ani žádné čisticí prostředky.

3. Tlačítka

Na lupě Compact+ HD najdete následující tlačítka:

Režim



Stisky tlačítka režimů vlevo od displeje cyklicky přepínáte režimy čtení. Podržíte-li tlačítko déle než 3 sekundy, vypnete osvětlení.

Zvětšení



Stisky tlačítek + a – vpravo od displeje zvětšujete nebo zmenšujete obraz. Současným stiskem obou tlačítek po dobu 1 sekundy zobrazíte nebo skryjete menu přístroje.

Momentka



Bílým tlačítkem momentky vpravo od displeje zmrazíte snímáný obraz, takže obraz z nepřístupného nebo vzdálenějšího místa si můžete dát před oči a pohodlně prohlédnout (přečíst). Obraz můžete uložit, když tlačítko stisknete po dobu 2 sekund.

Vypínač



Stiskem oranžového tlačítka pro zapnutí a vypnutí vlevo od displeje po dobu 1 sekundy lupu zapnete nebo vypnete.

Na zadní straně přístroje se nachází kamera a zrcátko. Vlevo a vpravo od kamery jsou umístěny dvě osvětlovací diody.

Zapnutí a vypnutí

Před prvním zapnutím přístroje je třeba Compact+ HD nabít. Jakmile je lupa nabitá, stiskněte na jednu sekundu oranžové tlačítko pro zapnutí a vypnutí, které je vlevo od displeje. Přístroj se spustí v režimu, ve kterém jste jej naposledy vypnuli. Compact+ HD vypnete, když znovu na jednu sekundu stisknete oranžové tlačítko.

Po zapnutí lupy trvá přibližně tři sekundy, než se na displeji objeví obraz.

Úprava zvětšení

Velikost zvětšení měníte tlačítky + či – vpravo od displeje. Tlačítkem + zvětšujete, tlačítkem – zmenšujete. Rozsah zvětšení je 2,8 krát až 11 krát.

Výběr režimu zobrazení

Stiskem tlačítka režimů vlevo od displeje můžete přepnout do jednoho z následujících režimů:

Fotorežim: pro čtení barevného textu a prohlížení fotografií.

Kontrastní negativ: pro čtení textu ve vysokém kontrastu – bílá na černé.

Kontrastní pozitiv: pro čtení textu ve vysokém kontrastu – černá na bílé.

Kontrastní barevná kombinace 1 – žlutá na modré.

Kontrastní barevná kombinace 2 – žlutá na černé.

Podržíte-li tlačítko režimů 3 sekundy, vypnete nebo zapnete osvětlení předlohy. Přepnutím do dalšího režimu se osvětlení automaticky znovu zapne.

Tlačítko momentky

Tlačítkem momentky dočasně zmrazíte snímáný obraz:

- Podržte Compact+ HD před textem či obrázkem, který chcete vyfotografovat.
- Obraz na displeji zmrazíte stiskem tlačítka momentky vpravo nahoře.
- Nyní se můžete na obraz na displeji podívat pohodlně zblízka.
- Stiskem tlačítka režimů můžete přepínat režimy zobrazení.
- Tlačítka pro zvětšení napravo od displeje můžete ve třech krocích měnit velikost zobrazeného obrazu.
- Když během prohlížení zmrazeného obrazu podržíte na 2 sekundy tlačítko momentky, tak obraz uložíte a vrátíte se k živému obrazu z kamery. Uložení obrazu bude potvrzeno krátkým pípnutím a indikátorem zobrazeným na displeji. V paměti lupy Compact+ HD je možné uložit maximálně 4 obrázky. Nový obrázek vždy nahradí nejstarší obrázek v paměti.
- Opětovný stisk tlačítka momentky přepne lupu zpět na živý obraz z kamery. Potom můžete znovu zmrazit jiný obraz.

4. Nabíjení baterie

Nabíjení lupy Compact+ HD

V dodávce lupy Compact+ HD je nabíjecí adaptér se čtyřmi nastavci pro různé normy síťových zásuvek (verze EU, US, UK, AU). Vyberte nastavec určený pro vaše prostředí a připojte jej k adaptéru.

Připojte napájecí kabel do konektoru pro vstup 5V ss (jack) na levé straně přístroje. Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky. Oranžová kontrolka vedle vstupního napájecího konektoru při nabíjení trvale svítí. Když je lupa nabitá, začne kontrolka svítit zeleně. Když kontrolka bliká, znamená to problém při nabíjení. V takovém případě adaptér odpojte a zkuste jej připojit znovu.

Nabíjení trvá asi 3,5 hodiny. Plně nabitý přístroj lze provozovat mimo síť v průměru 3 hodiny, záleží však na způsobu práce s lupou. K nabíjení používejte pouze dodávaný adaptér.

Pokud se Compact+ HD nezapíná, ujistěte se, zda není vybitý.

Pohotovostní režim a automatické vypnutí

Compact+ HD automaticky přechází do pohotovostního režimu, pokud po dobu 2 minut nebylo stisknuto žádné tlačítko a nebyla detekována žádná změna obrazu. Stiskem jakéhokoli tlačítka lupu opět probudíte. Čtyři minuty po přechodu do pohotovostního režimu se Compact+ HD automaticky vypne. Stiskem oranžového tlačítka po levé straně lupy znovu zapnete. V menu lupy lze čas pro přechod do pohotovostního režimu a pro automatické vypnutí nastavit nebo tyto funkce úplně vypnout. Jak tyto volby měnit se dočtete v následující kapitole.

Varování před nízkým stavem baterie



Když je baterie nabitá na méně než 5% celkové kapacity, zobrazuje se každou minutu ikona prázdné baterie a ozve se pípnutí. Po takovém varování nabijte baterii co nejdříve. Při vybité baterii se lupa vypne.

Pokud se Compact+ HD nezapíná, ujistěte se, zda není vybitý.

5. Menu lupy Compact+ HD

Zobrazí stav baterie a verzi firmwaru.



Lze prohlížet nebo mazat uložené obrázky.



Lze upravovat jas displeje.



Lze konfigurovat napájení a vypínání.



Lze zapnout či vypnout zvukovou signalizaci.



Lze nastavit barvy ve 4 kontrastních režimech čtení.



Lze obnovit výchozí nastavení od výrobce.



Vstup do menu



Do menu vstoupíte současným stiskem tlačítek + a - po jednu sekundu.

Pohyb v menu



Mezi položkami menu se pohybujete tlačítky + a -. Tlačítkem režimů vlevo od displeje aktivujete aktuální položku nebo potvrdíte právě vybranou volbu. Pro změnu volby použijte tlačítka + a -. Tlačítkem momentky se v menu vrátíte zpět.



Opuštění menu



Menu opustíte současným stiskem tlačítek + a - po jednu sekundu.

Menu: Information (informace)



Tato položka menu zobrazuje stav baterie a aktuální verzi firmwaru přístroje. V tomto menu se nedají provádět žádné změny.

- Současným stiskem tlačítek **+** a **-** po dobu jedné sekundy otevřete menu.
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem **+** a dolů tlačítkem **-**. Vyberte tak položku Information (informace) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů.
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek **+** a **-** po dobu jedné sekundy nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky.

Menu: Images (obrázky)



Toto menu obsahuje dvě podmenu:

- View: Prohlížení uložených obrázků.
- Delete: Smazání uložených obrázků.

Podmenu View (prohlížení):


Uložené obrázky si můžete prohlédnout takto:

- Současným stiskem tlačítek **+** a **-** po dobu jedné sekundy otevřete menu.
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem **+** a dolů tlačítkem **-**. Vyberte tak položku Images (obrázky) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů.
- Pomocí tlačítek **+** a **-** pro pohyb po položkách vyberte položku View (prohlížet). Položku aktivujte stiskem tlačítka režimů.
- Obrázek, který si chcete prohlédnout, vyberte pomocí tlačítka **+** pro přechod na další nebo tlačítka **-** pro přechod na předchozí obrázek. Vybraný obrázek zobrazte tlačítkem režimů.
- Tlačítky **+** a **-** si nastavte zvětšení obrázku. Tlačítkem režimů můžete měnit barvy.
- Tlačítkem momentky se vrátíte do živého obrazu z kamery.

**Podmenu Delete (smazání):**

Uložené obrázky můžete smazat takto:

- Současným stiskem tlačítek **+** a **-** po dobu jedné sekundy otevřete menu.
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem **+** a dolů tlačítkem **-**. Vyberte tak položku Images (obrázky) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů.

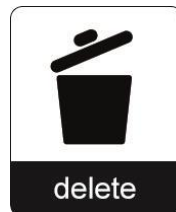

- Pomocí tlačítek **+** a **-** pro pohyb po položkách vyberte položku Delete (smazat). Položku aktivujte stiskem tlačítka režimů.
- Obrázek, který chcete smazat, vyberte pomocí tlačítka **+** pro přechod na další nebo tlačítka **-** pro přechod na předchozí obrázek. Vybraný obrázek smažte tlačítkem režimů.
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek **+** a **-** po dobu jedné sekundy nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky.

Menu: Brightness (jas)



Tato položka menu vám umožňuje upravovat jas displeje.

- Současným stiskem tlačítek **+** a **-** po dobu jedné sekundy otevřete menu.
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem **+** a dolů tlačítkem **-**. Vyberte tak položku Brightness (jas) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů.
- Tlačítkem **+** jas zvyšujete, tlačítkem **-** jas snižujete. Můžete si tak vybrat z pěti úrovní jasu. Výchozí úroveň je 5.
- Tlačítkem režimů potvrďte nastavení.
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek **+** a **-** po dobu jedné sekundy nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky.

Menu: Power (napájení)



Tato položka obsahuje dvě podmenu: Power off (vypínání) a Standby (pohotovostní režim).

Podmenu Power off (vypínání)



Zde můžete nastavit dobu, po které se Compact+ HD sám vypne. Ve výchozím nastavení to jsou 4 minuty. Tento čas se začíná počítat po výchozích dvou minutách nastavených pro přechod do pohotovostního režimu. Ve výchozím nastavení se tedy lupa vypne po 6 minutách nečinnosti.

Čas do automatického vypnutí nastavíte takto:

- Současným stiskem tlačítek + a - po dobu jedné sekundy otevřete menu.
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak položku Power (napájení) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů.
- Pomocí tlačítek + a - pro pohyb po položkách vyberte položku Power Off (vypínání). Položku aktivujte stiskem tlačítka režimů.
- Nastavte čas do automatického vypnutí lupy pomocí tlačítka + pro zvýšení a - pro snížení času. Volbou hodnoty DISABLED automatické vypínání zakážete.

- Stiskem tlačítka režimů nastavení potvrďte.
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky.

Podmenu Standby (pohotovostní režim)




Zde můžete nastavit dobu, po které Compact+ HD automaticky přejde do pohotovostního režimu, aby šetřil energii. Stiskem jakéhokoli tlačítka lupu z pohotovostního režimu probudíte. Ve výchozím stavu je čas do přechodu do úsporného režimu nastaven na 2 minuty.

Čas do přechodu do úsporného režimu nastavíte takto:

- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy otevřete menu.
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak položku Power (napájení) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů.
- Pomocí tlačítek + a – pro pohyb po položkách vyberte položku Standby (pohotovostní režim). Položku aktivujte stiskem tlačítka režimů.
- Nastavte čas do automatického přechodu do pohotovostního režimu pomocí tlačítka + pro zvýšení a – pro snížení času. Volbou hodnoty DISABLED automatický pohotovostní režim zakážete.
- Stiskem tlačítka režimů nastavení potvrďte.

- Menu opusťte současným stiskem tlačítek **+** a **-** po dobu jedné sekundy nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky.


Menu: Sound (zvuková signalizace)

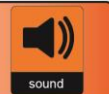

V tomto menu můžete zapnout či vypnout zvukovou odezvu lupy v podobě pípání různými tóny. Ve výchozím nastavení je zvuková signalizace zapnutá.

- Současným stiskem tlačítek **+** a **-** po dobu jedné sekundy otevřete menu.
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem **+** a dolů tlačítkem **-**. Vyberte tak položku Sound (zvuková signalizace) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů.
- Zvuky zapnete, když tlačítka **+** a **-** vyberete hodnotu ON. Když vyberete hodnotu OFF, zvuky vypnete.
- Stiskem tlačítka režimů nastavení potvrďte.
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek **+** a **-** po dobu jedné sekundy nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky.


Menu: Color (barvy)

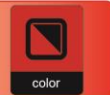

Compact+ HD podporuje čtyři kontrastní režimy zobrazení. Pro každý z těchto režimů si můžete vybrat barvu popředí a pozadí. Tři z těchto režimů můžete znepřístupnit, pokud potřebujete jen jeden kontrastní režim.

- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy otevřete menu.
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak položku Color (barvy) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů.
- V podmenu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak požadovaný kontrastní režim a volbu potvrďte stiskem tlačítka režimů.
- V seznamu barevných kombinací se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte si tak nové barvy popředí a pozadí a volbu potvrďte stiskem tlačítka režimů.
- Když pro položky 2, 3 a 4 zvolíte hodnotu DISABLED a potvrdíte ji tlačítkem režimů, budou tyto kontrastní režimy znepřístupněny.
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky.

Menu: Reset (obnova výchozího nastavení)

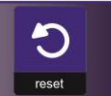

Nastavení lupy Compact+ HD je možné obnovit do výchozího výrobního nastavení. Jakékoli úpravy v nastavení se obnoví do výchozího stavu.

- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy otevřete menu.
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak položku Reset (obnovit výchozí nastavení) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů.
- Pro návrat k výchozímu nastavení vyberte pomocí tlačítek + a – hodnotu YES. Pokud vyberete položku NO, zůstanou všechna nastavení beze změny.
- Stiskem tlačítka režimů volbu potvrďte.
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky.

Dodatek A: Bezpečnostní pokyny

- Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu, riskujete poškození či vznícení.
- Neodnímejte žádné části lupy Compact+ HD. Opravu svěřte místnímu servisu pověřenému společností Optelec.
- Abyste předešli nebezpečí poškození elektřinou, nevystavujte Compact+ HD tekutinám a chemikáliím.
- S lupou zacházejte opatrně. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní součásti.
- Compact+ HD nepoužívejte v blízkosti nedostatečně odstíněných zdravotnických přístrojů.
- Nepokoušejte se otevírat prostor pro baterii a baterii vyndávat.
- V případě potřeby svěřte opravu svému prodejci. Přístroj nerozebírejte, protože byste tak přišli o záruku.
- Před čištěním lupu vždy nejprve odpojte. Přístroj čistěte opatrně, měkkou utěrkou a pouze zevně – čistícími přípravky a hadrem s hrubým povrchem můžete lupu poškodit.

Pokud při práci s lupou nebudete dodržovat pokyny této příručky, můžete ztratit nárok na záruční opravu.

Pozor: Nepoužívejte jiné příslušenství než dodávané výrobcem. Jinak můžete přístroj poškodit nebo zvýšit jeho vyzařování.

Dodatek B: Technické údaje

Zvětšení	3 – 10 krát
Režimy prohlížení	Barevný fotorežim, kontrastní negativ (bílá na černé) a pozitiv (černá na bílé), 2 kontrastní barevné kombinace
Displej	11 cm (4,3") TFT; rozlišení 480 x 272
Kontrastní poměr; jas	500:1; průměrně 550 cd/m ²
Rozměry; hmotnost	130 x 80 x 33 mm; 252 gramů
Li-ion baterie	Dobíjecí; 3,7V 1400mAh; asi 3 hodiny nabíjení Provozní doba - průměrně 3 hodiny nepřetržité práce
Síťový adaptér	100-240V, 50-60Hz, 0,3A; výstup ss 5V / 1,5A

Provozní podmínky

Teplota	10°C až 35°C
Vlhkost	< 70%, bez kondenzace
Nadmořská výška	do 3000 m
Tlak	700 – 1060 hPa

Skladovací a přepravní podmínky

Teplota	0°C až 40°C
Vlhkost	< 95%, bez kondenzace

Dodatek C: Prohlášení o shodě

RoHS

Tento výrobek vyhovuje direktivě 2011/65/EU (RoHS-II) a jejím dodatkům.

CE

Výrobky označené značkou shody CE vyhovují direktivě EMC (2004/108/EC) a direktivě pro nízkonapěťová zařízení (2006/95/EC) vydanými komisí EU.

Výrobek tedy splňuje tyto standardy:

EMC: EN 50081-1, EN 55022, EN 55024

FCC: FCC part 15 Class B

C-Tick: CISPR 22

Safety: UL 60950-1

Varování: Přístroj musí být instalovaný ve shodě s předpisy EMC (elektromagnetická kompatibilita). Při použití jiných propojovacích kabelů nebo příslušenství než dodaných výrobcem může vést k vyššímu elektromagnetickému vyzařování.



Toto zařízení je nositelem značky shody CE a FCC.

Dodatek D: Záruční podmínky

Na výrobek poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje a záruka se vztahuje na všechny vady, které vznikly následkem vadného materiálu, chybné montáže či opracováním. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným zacházením nebo z jiného důvodu než uvedeného. Zásah do výrobku jinou osobou než pověřeným servisem zbavuje dodavatele ručebního závazku za záruku. Odstranění uznané závady v záruční době provede na své náklady dodavatel, dopravní náklady do servisu a ze servisu hradí uživatel. Výrobce si vyhrazuje právo vadnou část opravit nebo nahradit podobným nebo lepším výrobkem.

Optelec ani jeho distributor nejsou odpovědní za nepřímé nebo následné škody. Nároky uživatele jsou omezeny jen na náhradu dílů výrobku. Tato záruka platí jen při servisu v zemi, kde byl přístroj zakoupený, a jen pokud není porušené zapečetění výrobku nebo jeho dílů. Při požadavku na opravu mimo tyto podmínky nebo po záruční době se prosím obraťte na svého prodejce. Výrobce Optelec nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je přístroj používán v rozporu s touto příručkou.

Pozn.: Akumulátorové baterie mají omezenou záruční dobu 6 měsíců a jejich životnost závisí na způsobu práce s přístrojem a na kvalitě péče o baterie. Opatřené baterie odkládejte na určené místo.

Podpora a servis

Potřebujete-li poradit, jak lupu instalovat nebo jak s lupou zacházet, obraťte se prosím na distributora nebo na svého prodejce.

Distribuce a autorizovaný servis:

Spektra v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Tel.: 241763416, 241774675; e-mail: info@spektra.eu

Internet: www.spektra.eu

Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212 (www.remasystem.cz).



Výrobní číslo přístroje:

