

Prisma - OPTi Lite: stručný průvodce

Funkce	Tlačítka na lupě	Nástroj. lišta	Klávesové zkratky	Menu
Pohotovostní	Ano		Ctrl + S	<u>F</u> ile -> <u>S</u> leep
Stále navrchu	Ano		Ctrl + T	<u>F</u> ile -> Keep on <u>T</u> op
Konec			Alt + F4	<u>F</u> ile -> <u>E</u> xit
Video v celé obrazovce	Ano		Esc or Ctrl + F Dvojím klepnutím ve video okně	<u>V</u> iew -> <u>F</u> ull screen
Zobrazení 0 ... 9			Ctrl + 0 ... Ctrl + 9	<u>V</u> iew -> Views <u>0</u> ... <u>9</u>
Uložení zobrazení			Shift + Ctrl + 0 ... Shift + Ctrl + 9	<u>V</u> iew -> <u>V</u> iews Manager
Správce zobrazení				<u>V</u> iew -> <u>V</u> iews Manager
Přepínat zobrazení	Ano		Ctrl + V	
Předvolby				<u>O</u> ptions -> <u>P</u> references...
Zvýraznění			Ctrl + H	<u>M</u> arkers

Funkce	Tlačítka na lupě	Nástroj. lišta	Klávesové zkratky	Menu
Ovl. prvky videa				<u>O</u> ptions -> <u>V</u> ideo controls...
Semicolor (barvy)			Alt + šipky	<u>O</u> ptions -> <u>C</u> olours...
Funkce tlačítek				<u>O</u> ptions -> <u>B</u> utton functions...
Nápověda			F1	<u>H</u> elp -> <u>C</u> ontents
Osvětlení zap/vyp	Ano		Ctrl + L	
Přemístění video okna			Shift + šipky	(Klepnout a táhnout myší uvnitř okna)
Změna velikosti video okna			↑ ↓ ← → PgUp PgDn	(Klepnout a táhnout myší za hranu okna)
Přepnout na OPTi a zpět	Ano		Scroll Lock	(učinit aplikaci OPTi – video okno – aktivní)
Rozvinout hlavní menu	Ano		Ctrl + M Pravým klepnutím ve video okně	

Klávesové zkratky kromě klávesy **Scroll Lock** fungují, jen je-li aplikace OPTi aktivní.