

**Uživatelská příručka
kamerové lupy**

TRAVELLER HD

Verze 1.1

**© 2015 Optelec, Nizozemsko
Všechna práva vyhrazena**



Optelec
P.O. Box 399
2993 LT Barendrecht
The Netherlands
Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88 6783 400
E-mail: info@optelec.nl
Web: www.optelec.com

(T) Spektra, 2015

Obsah

1. Úvod	3
1.1. O příručce	3
1.2. Obsah dodávky	4
1.3. Seznámení s lupou Traveller HD	4
2. Začínáme	5
2.1. Rozložení a složení lupy	5
3. Práce s lupou Traveller HD	6
3.1. Jak se lupa pohybuje po textu	6
3.2. Ovládací tlačítka	6
3.2.1. Vypnutí a zapnutí lupy.....	6
3.2.2. Zvětšení	6
3.2.3. Režimy čtení (prohlížení)	6
3.2.4. Osvícení předlohy	7
3.2.5. Momentka	7
3.2.6. Menu.....	7
3.2.7. Vodící linka	7
3.2.8. Změna umístění vodící linky	7
4. Menu	8
4.1. Otevření menu	9
4.2. Navigace v menu	9
4.3. Zavření menu.....	9
Menu: Information (informace)	9
Menu: Images (obrázky)	10
Menu: Brightness (jas)	11
Menu: Power (napájení).....	11
Menu: Sound (zvuková signalizace).....	13
Menu: Light (osvětlení)	14
Menu: Color (umělé barvy)	14
Menu: Reset (obnovení původního nastavení).....	15
5. Nabíjení	16
5.1. Nabíjení lupy Traveller HD	16
5.2. Stav baterie	16
Dodatek A: Prohlášení o shodě a bezpečnost	17
Dodatek B: Technické údaje	19
Kontakt	19

1. Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení lupy Traveller HD.

Výhodou kamerové lupy Traveller HD je, že má nízkou váhu, a je tak možné ji snadno přenášet. Lupa Vám mimo jiné umožní číst texty, prohlížet fotografie a provádět drobnou ruční práci. Lupa zvětšuje písmo, předměty a obrázky a zvyšuje kontrast čtených textů. Můžete si nastavit kontrastní barevný režim pro čtení, který Vám nejvíce vyhovuje, jas obrazovky a další. Lupa se snadno obsluhuje a je určena k práci doma, v zaměstnání nebo ve škole.

1.1. O příručce

V této příručce se seznámíte s ovládáním a se základními funkcemi lupy Traveller HD. Příručku si prosím pečlivě prostudujte, než začnete s přístrojem pracovat.


1.2. Obsah dodávky

Dodávka obsahuje:

- Kamerovou lupu Traveller HD
- Ochranné pouzdro pro přenášení lupy
- Síťový adaptér se síťovým kabelem
- Utěrku na čištění obrazovky
- Uživatelskou příručku

1.3. Seznámení s lupou Traveller HD

Čísla 1 až 9 označují nejdůležitější součásti kamerové lupy Traveller HD.

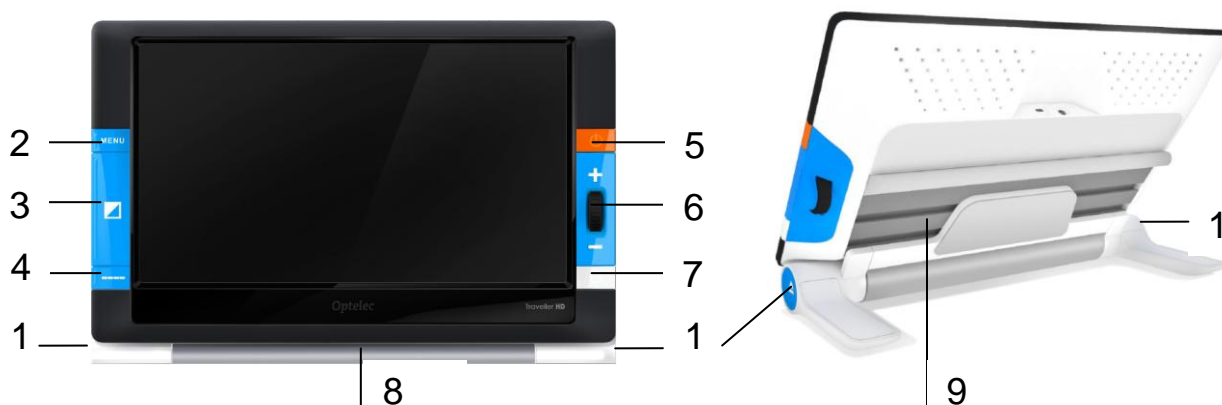

1. Tlačítka pro odemknutí obrazovky
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítko Čtecí režimy
4. Tlačítko Vodící linka
5. Tlačítko Vypínač

6. Kolečko s funkcí zoomu
7. Tlačítko Momentka
8. Válec
9. Kolejnice

2. Začínáme


Lupu Traveller HD položte před sebe na stůl tak, aby byla obrazovka nahoře a oranžový vypínač po pravé straně obrazovky.

2.1. Rozložení a složení lupy

Lupu Traveller HD lze používat pouze v rozloženém stavu. Po rozložení je obrazovka nakloněná v ideálním úhlu ke čtenáři a kamera směřuje přímo dolů. Konstrukce lupy umožňuje číst i dlouhé texty a díky válci se lupa snadno pohybuje po předloze.

Jak lupu rozložíte:

1. Položte lupu před sebe obrazovkou nahoru tak, aby oranžový vypínač byl po pravé straně obrazovky.
2. Stiskněte obě modrá tlačítka po stranách válce. Tím odemknete obrazovku lupy. Obrazovka se mírně zvedne a zapne se.
3. Uchopte horní část monitoru rukou a lehce zatlačte směrem vzhůru. Obrazovka se posune do polohy pro čtení a uzamkne se.

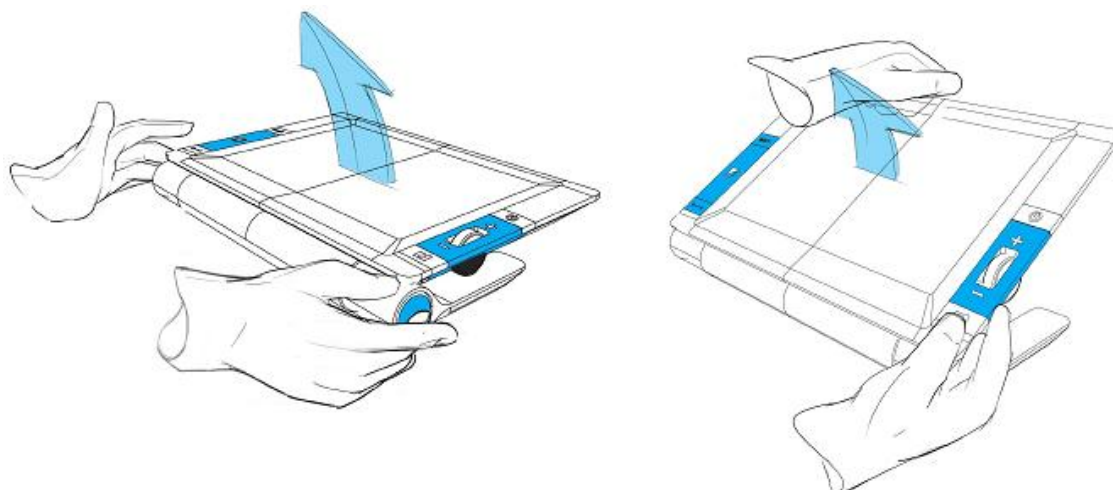

Stiskněte obě modrá tlačítka po stranách válce.

Uchopte horní část monitoru rukou a zatlačte směrem vzhůru.

Jak lupu složíte:

1. Položte lupu před sebe obrazovkou nahoru tak, aby byl monitor ve středové poloze a oranžový vypínač po pravé straně obrazovky.
2. Stiskněte obě modrá tlačítka po stranách válce.
3. Mírným tlakem na monitor směrem dolů lupu posunete do složené polohy. Obrazovka se uzamkne.

Důležité upozornění: Pro rozložení a složení lupy vždy používejte modrá tlačítka po stranách válce. Jinak je obrazovka uzamčená a nelze měnit její sklon.

3. Práce s lupou Traveller HD

3.1. Jak se lupa pohybuje po textu

Položte lupu na text, který chcete číst. Po textu se můžete pohybovat ve dvou směrech: vertikálně (shora dolů) a horizontálně (zprava doleva). Pro pohyb shora dolů lupa využívá válec umístěný pod obrazovkou, pro pohyb zprava doleva kolejnici na zadní straně monitoru. V obou směrech se lupa díky válci a kolejnici snadno pohybuje a lehce klouže po předloze.

3.2. Ovládací tlačítka

3.2.1. Vypnutí a zapnutí lupy

Lupu zapnete oranžovým tlačítkem po pravé straně obrazovky tak, že ho podržíte po dobu 2 vteřin. Lupa vydá zvukový signal („zapípá“) a zapne se ve stejném čtecím režimu, jako když byla vypnuta. Lupu vypnete tak, že stisknete totéž oranžové tlačítko opět po dobu 2 vteřin. Nastavení v Menu je možné změnit tak, aby se lupa automaticky zapnula vždy při otevření a vypnula při zavření.

3.2.2. Zvětšení

Velikost zvětšení upravíte pomocí kolečka po pravé straně obrazovky. Pohybem kolečka směrem nahoru zvětšujete, pohybem směrem dolů zmenšujete.

3.2.3. Režimy čtení (prohlížení)

Režim čtení si zvolíte tak, že tisknete prostřední modré tlačítko po levé straně obrazovky. Můžete si vybrat až mezi 5 prohlížečimi režimy:

1. **Fotorežim:** zobrazuje skutečné barvy předlohy (vhodný ke čtení barevného textu nebo prohlížení fotografií).
2. **Čtecí režim 1:** Režim zvyšuje kontrast mezi popředím a pozadím. Obrázky a text se zobrazí v kontrastním režimu, při prvním spuštění lupy je standardně nastaven černý text na bílém pozadí. Barvu popředí a pozadí lze změnit v menu.
3. **Čtecí režim 2 (volitelný):** Režim zvyšuje kontrast mezi popředím a pozadím. Obrázky a text se zobrazí v kontrastním režimu, při prvním spuštění lupy je standardně nastaven bílý text na černém pozadí. Barvu popředí a pozadí lze změnit v menu; v menu lze tento čtecí režim také úplně vypnout.
4. **Čtecí režim 3 (volitelný):** Režim zvyšuje kontrast mezi popředím a pozadím. Při prvním spuštění lupy je tento režim standardně vypnutý. Lze ho zaplnout v menu; v menu lze také změnit barvu popředí a pozadí.

5. **Čtecí režim 4 (volitelný):** Režim zvyšuje kontrast mezi popředím a pozadím. Při prvním spuštění lupy je tento režim standardně vypnutý. Lze ho zaplnout v menu; v menu lze také změnit barvu popředí a pozadí.

3.2.4. Osvícení předlohy

Osvícení předlohy vypnete tak, že podržíte tlačítko Čtecí režimy po dobu 3 vteřin. Pokud tlačítko znovu podržíte po dobu 3 vteřin, osvětlení předlohy se opět zapne.

3.2.5. Momentka

Momentka Vám umožňuje vyfotografovat snímaný obraz, a to tak, že stisknete bílé tlačítko Momentka po pravé straně obrazovky. Pokud chcete obrázek uložit, stiskněte totéž tlačítko po dobu 2 vteřin. Lupa Traveller HD umí uložit do paměti až 1000 obrázků.

3.2.6. Menu

Pokud chcete změnit nastavení v menu, stiskněte horní modré tlačítko po levé straně obrazovky s označením „Menu“. O možnostech nastavení menu se dozvíte více ve 4. kapitole.









3.2.7. Vodící linka

Vodící linka Vám pomůže umístit lupu rovně na předlohu. Pokud chcete vodící linku zobrazit, stiskněte spodní modré tlačítko po levé straně obrazovky po dobu 2 vteřin. Pokud chcete vodící linku skrýt, tlačítko stiskněte znovu.

3.2.8. Změna umístění vodící linky

Když je vodící linka zobrazena, stiskněte spodní modré tlačítko po levé straně obrazovky po dobu 2 vteřin. Vodící linka začne blikat a Vy můžete změnit její umístění na obrazovce. Umístění měníte tak, že tisknete tlačítko Vodící linka. Můžete si vybrat ze 3 poloh: v horní polovině obrazovky, ve středu a ve spodní polovině obrazovky. Po uplynutí 5 vteřin vodící linka přestane blikat a není dále možné její umístění měnit.

4. Menu


Ukazuje stav baterie a verzi firmwaru.	
Umožňuje prohlížet a mazat uložené obrázky.	
Umožňuje upravit jas obrazovky.	
Umožňuje konfigurovat napájení a vypínání.	
Umožňuje vypnout či zapnout zvukovou signalizaci.	
Umožňuje vypnout či zapnout osvětlení.	
Umožňuje měnit barvy u čtecích režimů.	
Umožňuje obnovit původní nastavení.	

4.1. Otevření menu



Menu otevřete stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.

4.2. Navigace v menu

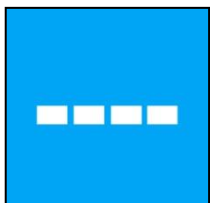


V menu se pohybujete pomocí tlačítek Vodící linka a Menu. Tlačítkem Čtecí režimy aktivujete vybranou položku a výběr potvrdíte. Výběr měníte tlačítky Vodící linka a Menu. Pokud se chcete v menu vrátit zpět na vyšší úroveň, stiskněte tlačítko Momentka.



4.3. Zavření menu



Menu zavřete stisknutím tlačítka Momentka nebo tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.

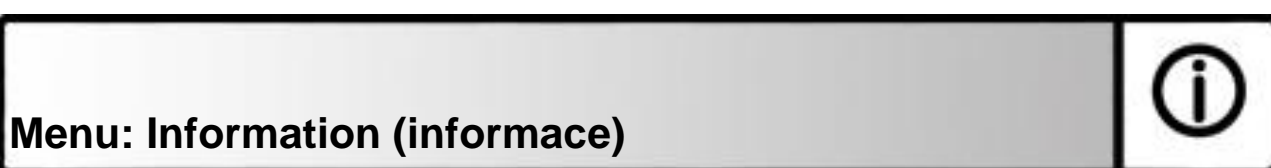

Tato položka ukazuje stav baterie a verzi firmwaru. Položka je jen informativní, její nastavení nelze měnit.

- Menu otevřete stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete tlačítky Menu a Vodící linka. Stiskněte tlačítko Menu pro pohyb nahoru a tlačítko Vodící linka pro pohyb dolů.
- Menu zavřete stisknutím tlačítka Momentka.

Menu: Images (obrázky)



Tato položka má submenu se 3 nabídkami:

- View: Zde si můžete prohlédnout uložené obrázky.
- Delete: Zde můžete vymazat uložené obrázky.
- Delete all: Zde můžete vymazat všechny uložené obrázky.

Nabídka View

Jak si prohlédnete uložené obrázky:

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Images a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Vyberte nabídku View (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete opět pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Vyberte obrázek, který si chcete prohlédnout. Obrázek vyberete pomocí tlačítka Menu (pro pohyb nahoru v seznamu obrázků) a tlačítka Vodící linka (pro pohyb dolů). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Menu opustíte stisknutím tlačítka Momentka.



Nabídka Delete

Jak vymažete uložené obrázky:

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Images a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Vyberte nabídku Delete (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete opět pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Vyberte obrázek, který chcete vymazat. Obrázek vyberete pomocí tlačítka Menu (pro pohyb nahoru v seznamu obrázků) a tlačítka Vodící linka (pro pohyb dolů). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Stiskněte tlačítko Čtecí režimy, abyste potvrdili, že obrázek chcete opravdu vymazat. Pokud obrázek nechcete vymazat, výběr zrušíte tlačítkem Momentka.
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.



Nabídka Delete all

Jak vymažete všechny uložené obrázky:

- Otevřete menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Images a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Vyberte nabídku Delete all (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete opět pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Stiskněte tlačítko Čtecí režimy, abyste potvrdili, že opravdu chcete vymazat všechny uložené obrázky. Pokud nechcete vymazat všechny uložené obrázky, výběr zrušíte tlačítkem Momentka.
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.

**Menu: Brightness (jas)**

Tato položka umožňuje nastavit úroveň jasu obrazovky.

- Otevřete menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Brightness a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Úroveň jasu nastavíte pomocí tlačítka Menu (pro zvýšení jasu) a Vodící linka (pro snížení jasu). Volíte z 5 úrovní jasu. Při prvním spuštění lupy je standardně nastaven jas na nejvyšší úrovni.
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.

Menu: Power (napájení)

Tato položka má submenu se 4 nabídkami:

- Standby: Zde nastavíte dobu, po které lupa přejde do pohotovostního režimu.
- Power off: Zde nastavíte dobu, po které se lupa zcela vypne.
- Open: Zde nastavíte, zda chcete nebo nechcete, aby se lupa při rozložení automaticky zapnula.

- Close: Zde nastavíte, zda chcete nebo nechcete, aby se lupa při složení automaticky vypnula.

Nabídka Standby

V této nabídce nastavíte, po jaké době lupa přejde do pohotovostního režimu, který šetří energii. Při prvním spuštění lupy je tato doba standardně nastavena na 15 minut. Pro opuštění pohotovostního režimu stiskněte jakékoli tlačítko.



Dobu, po jaké lupa přejde do pohotovostního režimu, změníte takto:

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Power a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Vyberte nabídku Standby (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Zvolte dobu, po jaké lupa přejde do pohotovostního režimu, pomocí tlačítek Menu (prodloužení času) a Vodící linka (zkrácení času). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud nechcete, aby lupa přešla do pohotovostního režimu, vyberte nabídku NEVER.
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.

Nabídka Power off

V této nabídce nastavíte dobu, po které se lupa automaticky zcela vypne. Při prvním spuštění lupy je tato doba standardně nastavena na 5 minut. Těchto 5 minut se začne počítat po uplynutí 15 minut, kdy je lupa v pohotovostním režimu. Lupa se tedy automaticky vypne 20 minut poté, co s ní přestanete pracovat.



Dobu, po jaké se lupa automaticky vypne, změníte takto:

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Power a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Vyberte nabídku Power off (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Zvolte dobu, po jaké se lupa automaticky vypne, pomocí tlačítek Menu (prodloužení času) a Vodící linka (zkrácení času). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud nechcete, aby se lupa automaticky vypnula, vyberte nabídku NEVER.
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.

Nabídka Open

Pokud chcete, aby se lupa při rozložení automaticky zapnula (nebo tuto funkci naopak chcete vypnout), postupujte takto:


- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Power a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Vyberte nabídku Open (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Pokud chcete, aby se lupa při rozložení automaticky zapnula, vyberte nabídku POWER ON (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud nechcete, aby se lupa při rozložení automaticky zapnula, vyberte nabídku NOTHING.
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.



Nabídka Close

Pokud chcete, aby se lupa při složení automaticky vypnula (nebo tuto funkci naopak chcete vypnout), postupujte takto:

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Power a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Vyberte nabídku Close (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Pokud chcete, aby se lupa při složení automaticky vypnula, vyberte nabídku POWER OFF (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud nechcete, aby se lupa při složení automaticky vypnula, vyberte nabídku NOTHING. Pokud chcete, aby lupa při složení automaticky přešla do pohotovostního režimu, vyberte nabídku STANDBY.
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.

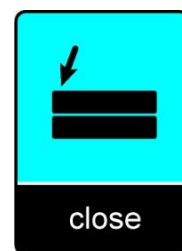

Menu: Sound (zvuková signalizace)



Tato položka umožňuje zapnout nebo vypnout zvukovou signalizaci. Při prvním spuštění lupy je zvuková signalizace standardně zapnutá.

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Sound a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Pokud chcete zvukovou signalizaci zapnout, vyberte nabídku ON (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud chcete zvukovou signalizaci vypnout, zvolte nabídku OFF.
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.

Menu: Light (osvětlení)



Tato položka umožňuje zapnout nebo vypnout osvětlení předlohy. Při prvním spuštění lupy je osvětlení předlohy standardně zapnuté.

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Light a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Pokud chcete osvětlení předlohy zapnout, vyberte nabídku ON (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud chcete osvětlení předlohy vypnout, zvolte nabídku OFF.
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.


Menu: Color (umělé barvy)



Lupa Traveller HD nabízí 4 kontrastní režimy pro čtení. Pro každý z těchto režimů si můžete zvolit barvu popředí a pozadí. Pokud Vám stačí pouze jeden čtecí režim, ostatní režimy může v menu vypnout.

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Color a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Zvolte čtecí režim (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.

- Nyní máte možnost vybrat si novou kombinaci barev pro popředí a pozadí (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Pro potvrzení nové barevné kombinace stiskněte tlačítko Čtecí režimy. Čtecí režimy 2, 3 a 4 můžete vypnout tak, že vyberete nabídku DISABLED (křížek).
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.

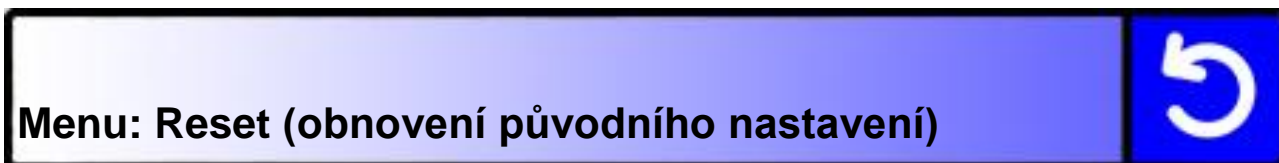

Tato položka umožňuje obnovit původní nastavení lupy. Všechny změny v nastavení, které byly provedeny uživatelem, budou zrušeny a lupa bude nastavena stejně jako při prvním spuštění.

- Otevřte menu stisknutím tlačítka Menu po dobu 2 vteřin.
- Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí tlačítek Menu (pohyb nahoru) a Vodící linka (pohyb dolů). V menu vyberte položku Reset a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy.
- Pokud chcete obnovit původní nastavení, vyberte nabídku YES (mezi jednotlivými nabídkami se pohybujete pomocí tlačítek Menu a Vodící linka). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Čtecí režimy. Pokud nechcete obnovit původní nastavení, zvolte nabídku NO.
- Zpět o úroveň výš v menu se vrátíte stisknutím tlačítka Momentka.

5. Nabíjení

5.1. Nabíjení lupy Traveller HD

Připojte napájecí kabel do konektoru pro vstup 12V ss (jack) na levé straně přístroje. Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky. Barevná kontrolka vedle vstupního napájecího konektoru při nabíjení trvale svítí červeně. Když je lupa nabitá, kontrolka začne svítit zeleně. Když kontrolka bliká, znamená to problém při nabíjení. V takovém případě adaptér odpojte a zkuste jej znovu připojit.

Nabíjení trvá přibližně 6 hodin. S plně nabitým přístrojem lze pracovat mimo síť v průměru 3 hodiny, záleží však na nastavení lupy. K nabíjení používejte pouze adaptér, který byl dodán s lupou.

5.2. Stav baterie



Když je baterie nabitá na méně než 5% celkové kapacity, každou minutu se na 2 vteřiny zobrazuje ikona prázdné baterie. Po takovém varování nabijte baterii co nejdříve. Při zcela vybité baterii se lupa automaticky vypne.

Pokud se vám lupa nedaří zapnout, ujistěte se, že je nabitá.

servisem zbavuje dodavatele ručebního závazku za záruku. Odstranění uznané závady v záruční době provede na své náklady dodavatel, dopravní náklady do servisu a ze servisu hradí uživatel. Výrobce si vyhrazuje právo vadnou část opravit nebo nahradit podobným nebo lepším výrobkem.

Optelec ani jeho distributor nejsou odpovědní za nepřímé nebo následné škody. Nároky uživatele jsou omezeny jen na náhradu modulů výrobku. Tato záruka platí jen při servisu v zemi, kde byl přístroj zakoupený, a jen pokud není porušené zapečetění modulů. Při požadavku na opravu mimo tyto podmínky nebo po záruční době se prosím obraťte na svého prodejce.

Výrobce Optelec nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je přístroj používán v rozporu s touto příručkou.

Pozn.: Akumulátorové baterie mají omezenou záruční dobu 6 měsíců a jejich životnost závisí na způsobu práce s přístrojem a na kvalitě péče o baterie. Opotřebené baterie odkládejte na určené místo.

Splnění mezinárodních standardů

Lupa Traveller HD vyhovuje následujícím direktivám:

93/42 EEC ze 14.6. 1993, zařízení Class I / Annexe VII

Zdravotnické prostředky s elektrickým napájením musí splňovat požadavky EMC (elmag.kompatibility) a musí být instalovány a uvedeny do provozu ve shodě s direktivou EMC.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte jiné příslušenství, adaptér ani jiné propojovací kabely než dodávané výrobcem. V opačném případě můžete přístroj poškodit nebo zvýšit jeho vyzařování.



Toto zařízení je nositelem značky shody CE, FCC a UL.

Dodatek B: Technické údaje

Zvětšení	2,4 – 30 krát (+/-3%)
Režimy prohlížení	Barevný fotorežim Kontrastní barevná kombinace 1, bílá na černé Kontrastní barevná kombinace 2, černá na bílé Kontrastní barevná kombinace 3 (nežadáno) Kontrastní barevná kombinace 4 (nežadáno)
Obrazovka	širokoúhlá TFT 13,3" (34 cm)
Provoz z baterie	v průměru 3 hodiny provozu Doba nabíjení 6 hodin.
Integrované osvětlení	LED
Rozměry	365x240x49 mm
Hmotnost	1995 g

Doporučené provozní podmínky

Teplota	10° až 35°C
Relativní vlhkost	< 70%, bez kondenzace
Nadmořská výška	do 3000 m
Tlak	700 – 1060 hPa

Skladovací a přepravní podmínky

Teplota	10° až 40°C
Relativní vlhkost	< 95%, bez kondenzace
Nadmořská výška	do 12192 m
Tlak	186 – 1060 hPa

Kontakt

Prodej a servis: Spektra v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4;
www.spektra.eu

Výrobce: Optelec, Breslau 4, 2993 LT Barendrecht, Nizozemí;
www.optelec.com

UDC-02178
Rev: A

