

Bierley

ColorMouse / MonoMouse – USB – MD™ návod k obsluze barevné / černobílé elektronické lupy do USB

Vážený uživateli,

rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení lupy Bierley, která za přijatelnou cenu nabízí funkčnost i ergonomii. Tato elektronická lupa je vybavena režimem MD - režimem se zvýšeným kontrastem kompenzujícím makulární degeneraci. Přejeme příjemnou a spokojenou práci s lupou.



Instalace

A. Instalace softwaru

1. Odpojte všechny kamery od systému a do mechaniky vložte instalační CD (pro systémy Windows XP a vyšší).
2. Spustíte soubor „Bierley Color-Mouse-USB-MD.exe“ pro barevnou lupu ColorMouse nebo soubor „Bierley Mono-Mouse-USB-MD.exe“ pro černobílou lupu MonoMouse.
3. Podle potřeby odklepávejte „Next“ (dále), nakonec „Finish“ (dokončit).

B. Instalace hardwaru

Připojte lupu do portu USB 2.0 v počítači (u stolních PC používejte jen porty USB montované na počítači vzadu !).

Hardware se instaluje automaticky. Po instalaci dostanete hlášku, že nové zařízení je připraveno k provozu.

Práce s lupou

Spustíte program „Bierley magnifier“ (nachází se ve složce Programy > Bierley). Pohybuje lupou nad předlohou a zvětšený obraz předlohy uvidíte ve video okně lupy. Ovládací prvky video okna lupy jsou popsány na další stránce.


Pozn.: Při každém spuštění programu na lupě 2x blikne kontrolka LED a zabliká video okno lupy (ověřuje se připojené zařízení a optimalizuje se osvětlení).

Pozn.: Alternativní video okno lupy s dalšími funkcemi poskytuje program enVid (přesný popis je uveden v návodu k programu enVid).

Moderní kompenzační pomůcky:

Spektra v.d.n., Zátěšská 1914/1, Praha 4; info@spektra.eu, www.spektra.eu

Video okno programu „Bierley magnifier“:

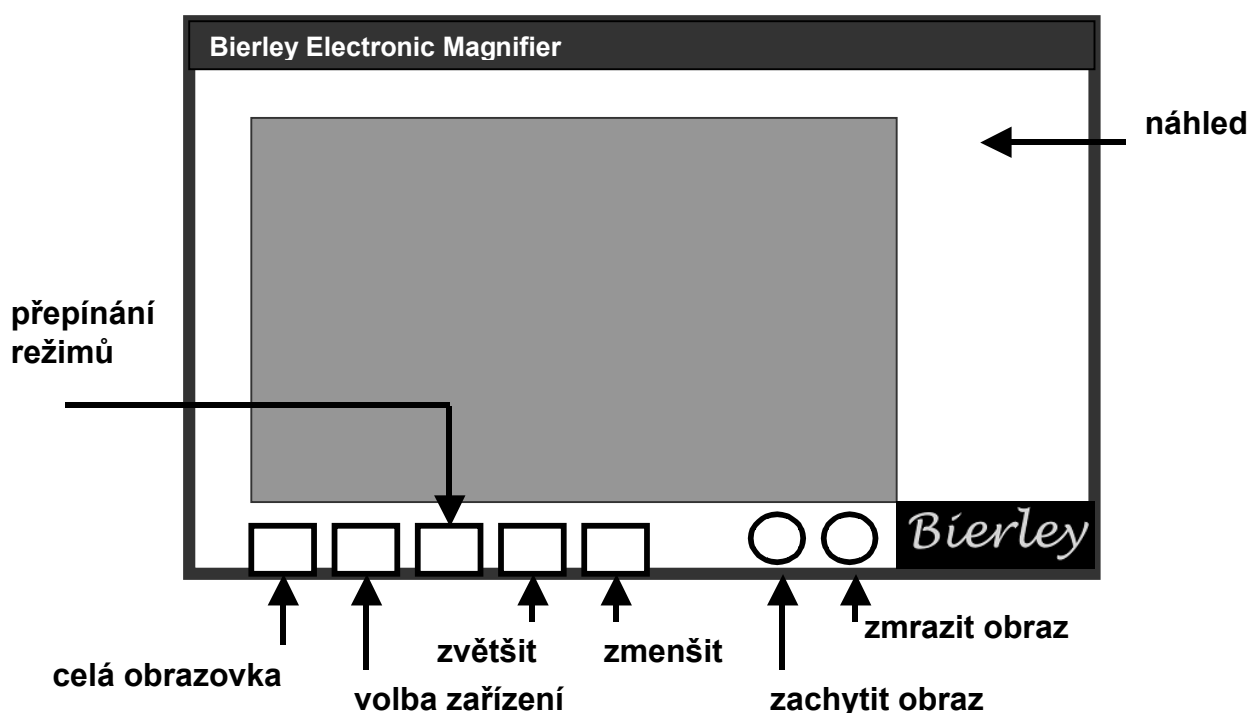

Bezpečnostní upozornění

Přístroj nerozebírejte! Přívodní kabel násilně neohýbejte a vedte jej tak, aby po něm nikdo nešlapal ani lupu neshodil.

Shoda

Přístroj je testován podle direktivy 73/23/EEC a dodatku 93/68/EEC pro nízkonapěťová zařízení a má značku shody CE.

Výrobce

Bierley.com Ltd.
Crossing Cottage
Wyfordby, LE14 4RY
Velká Británie

www.bierley.com

Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212 (www.remasystem.cz).



Moderní kompenzační pomůcky:

Spektra v.d.n., Zátíšská 1914/1, Praha 4; info@spektra.eu, www.spektra.eu