

Návod ke klávesnici BigKeys LX

- Klávesnice BigKeys je určena uživatelům, kteří mají problémy s jemnou motorikou a psaní na normální klávesnici jim nevyhovuje
- Klávesy jsou velké a dobře viditelné: 2,5 x 2,5 cm
- Klávesnice nevyžaduje instalaci, pouze ji připojíte k počítači

Instalace a údržba

Instalace: Vypněte počítač. Připojte klávesnici k počítači (do konektoru PS2 nebo s využitím dodávaného adaptéru do portu USB). Zapněte počítač.

Pozn.: Klávesnici můžete používat s paralelně připojenou standardní klávesnicí.

Údržba: Udržujte klávesnici v čistotě, nepolijte ji tekutinou.

Klávesové kombinace

Klávesnice BigKeys má menší počet kláves než standardní počítačová klávesnice, proto musíte některé klávesy simulovat kombinací s jinou klávesou:

Klávesa na standardní klávesnici	Kombinace na klávesnici BigKeys
PgUp	F + kurzorová šipka nahoru
PgDn	F + kurzorová šipka dolů
End	F + pravá kurzorová šipka
Home	F + levá kurzorová šipka
F1 až F9	F + plus, ě...í (tj. 1 až 9 na US klávesnici)
F10	F + é (tj. 0 na US klávesnici)
F11	F + minus (pod klávesou CAPSLOCK)
F12	F + středník (pod klávesou CTRL)
PrintScreen	F + P
[F + ů
]	F + §
{	F + Shift (podržet) + ů
}	F + Shift (podržet) + §
€ (euro)	F + E
Čárka, háček pro psaní ó, ď, ť, ň...	(pod klávesou DEL)

Kombinace v pravém sloupci tabulky znamenají, že stisknete a podržíte první uvedenou klávesu a pak k ní dotisknete druhou klávesu v kombinaci a obě klávesy uvolníte.

Když nedokážete stisknout dvě klávesy současně, zapněte si **asistenční režim** třemi stisky klávesy CapsLock po sobě (a v systému Windows musíte zapnout funkci „jedním prstem“). V asistenčním režimu už můžete psát jen jedním

prstem, takže např. funkční F2 zadáte tak, že stisknete a uvolníte klávesu F a poté stisknete a uvolníte klávesu „ě“. Pokud potřebujete napsat písmeno „f“, musíte stisknout klávesu F dvakrát po sobě. Zda jste či nejste v asistenčním režimu, poznáte po stisku klávesy F: Když stisknete F a nic se nestane, jste v asistenčním režimu; když se po stisku F napíše písmeno f, v asistenčním režimu nejste.

Pozn.: Třemi stisky klávesy CapsLock asistenční režim zase vypnete. Při stisku klávesy je do počítače odeslán jen jeden úhoz (na normální klávesnici je podržení klávesy interpretováno jako opakované úhozy).

Funkci „Jedním prstem“ zaškrtnete ve Windows v dialogu Možnosti usnadnění, který otevřete z nabídky Start > Nastavení > Ovl.panely > Možnosti usnadnění.

Uspořádání ABC.. nebo QWERTZ..



Můžete si zvolit uspořádání kláves na klávesnici ABC nebo QWERTZ (viz obr.) podle toho, které Vám lépe vyhovuje. Otočte klávesnici a na zadní straně vlevo uprostřed je přepínač pro změnu uspořádání kláves. Přepínač posuňte tužkou nebo sponkou. Režim QWERTZ je zapnutý v poloze přepínače nahoru, režim ABC v poloze dolů. Po přepnutí musíte změnit fyzické rozložení kláves: o změnu požádejte svého prodejce, jinak riskujete, že klávesu rozlomíte.

Pozn.: Nedoporučujeme měnit fyzické rozložení kláves více než jedenkrát.

Doplňkové vybavení

Ke klávesnici je možné dokoupit plexisklový kryt s otvory pro každou klávesu. Takový kryt je vhodný pro uživatele, který nedokáže usměrnit pohyb ruky a prstu na konkrétní klávesu: kryt ulehčuje navedení prstu a stisk správné klávesy.

Dále lze koupit český nebo slovenský potisk, kterým polepíte klávesy odlišné od americké klávesnice.

Pro připojení klávesnice nebo klávesnic můžete zakoupit PS2 a USB redukce nebo rozbočovače.

Značka shody

Výrobek nese značku shody CE a FCC (třída B, část 15).

