


RÝSOVACÍ PRKNO - A4 nebo A3

Kreslení a psaní

pohodlně – rychle – jednoduše – na cenově dostupném materiálu

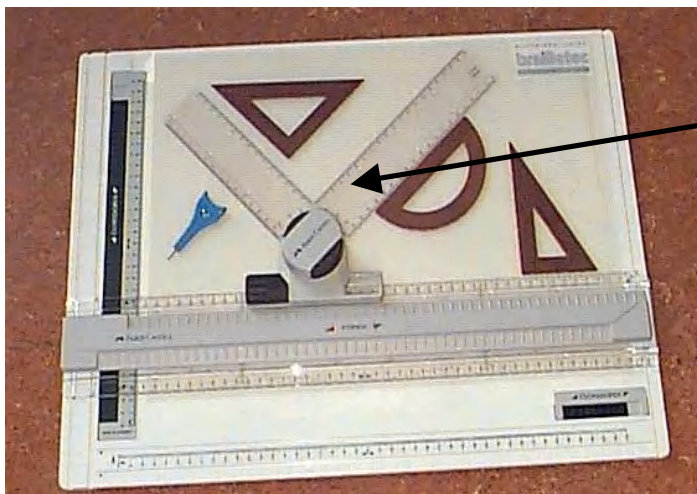

Přídavný úhelník k rýsovacímu prknu

- Lze nasadit na pravítko a posouvat
- Tlačítko aretace (STOP/GO)
- Pravý úhel lze natáčet
- Rozsah otáčení 90°
- Fixace po 15°

Práce na prkně je velmi snadná:

- Můžete kreslit nebo psát s následným nahmatáním kresby a můžete sledovat kreslicí tužku prstem
- Neriskujete poranění vyšší teplotou nebo ostrým hrotem pisátka
- Máte volné ruce - fólii přidržují svorky
- Můžete používat normální propisku nebo bodátko
- Kreslíte na cenově dostupnou fólii

Jak kreslíte:

- Na rýsovacím prkně je nalepena silikonová podložka
- Na silikonovou podložku položíte rýsovací fólii, kterou připevníte dvěma rychloupínacími svorkami (CLOSED/OPEN = zavřít/otevřít)
- Podložka a svorky pevně drží rýsovací fólii, takže obě ruce jsou volné a můžete pohodlně kreslit, psát nebo nahmatávat
- Vezměte do ruky pisátko - propisku nebo bodátko – a držte je šikmo
- Pisátkem pak kreslíte vystupující čáru, kterou sledujete prsty druhé ruky

- Čím silněji na pisátko tlačíte, tím je kresba vystouplejší

Popis rýsovacího prkna:

- Rýsovací prkno z umělé hmoty, silné 1 cm
- Rozměry pro A4: 30 x 37,5 cm
- Rozměry pro A3: 37,5 x 51,5 cm
- Silikonová podložka silná 1 mm
- Upínací svorky: na delší straně po celé délce, na kratší straně dlouhá 8 cm; v odemčené poloze drží zvednuté, takže při zakládání fólie jsou obě ruce volné
- Posuvné pravítko má zářezy po 1 cm, prodloužené po 5 cm
- Aretace pravítka jezdcem STOP/GO

Zaznamenat • Napsat • Vytisknout ve slepeckém písmu. Když jde o Braillovo písmo: BRAILLETEC!

Blista-Brailletec gemeinnützige GmbH für Blinden- und Sehbehindertentechnik

Rýsovací souprava umožňuje velmi přesné rýsování i méně zručným uživatelům:

- Odolné hmatné značení po 1 cm
- Posuvné pravítko s aretací
- Trojúhelníky s hmatnými body a zářezy po 1 cm
- Úhelník s hmatnými body a zářezy po 10°

Využití ve škole:

Náčrty, trénování podpisu, hodiny geometrie, zeměpisu nebo výtvarné výchovy.
Kreslení na tabuli obecně.

Snadný dorozumivací nástroj mezi vidomými a nevidomými:

Ne všichni umíme věci vysvětlovat tak, aby si je ostatní dovedli hned představit.

Náčrt cesty, půdorys nebo prostorový plán pomáhají vysvětlit nebo porozumět nevidomým i vidomým.

Ideální podložka pro začínající čtenáře bodového písma:

Rýsovací prkno MARBURG je rovné, takže jednotlivé listy s bodovým písmem lze na něm pohodlně číst, aniž by sjížděly – obě ruce jsou volné, protože listy není třeba přidržovat.

Rychlé poznámky pro osleplé v pozdějším věku:

Zkuste na rýsovací fólii něco napsat asi tři centimetry vysokým hůlkovým písmem, např. jméno, telefonní číslo, nějaké slovo. Po krátkém zácvičku každý zvládne hmatem číst takto psaný text. Přirozeně toto čtení bude vždy pomalejší než čtení bodového písma.

Méně zkušenému čtenáři čtení ulehčíte tak, že budete:

- psát většími písmeny
- používat větší mezery mezi písmeny
- tlačit na rýsovací tužku a psát tak silnější písmena
- držet kreslicí tužku více zešikma a psát tak hrubším písmem.

Rýsovací souprava MARBURG:

Rýsovací souprava obsahuje rýsovací prkno, 2 trojúhelníky a 1 úhelník (k prknu A3 ještě pravítko dlouhé 20cm). Vše z plastu se zářezy po 1cm resp. po 10 stupních.

Objednávka:

Rýsovací prkno A 4 (MARBURG)	00 - 76400
Rýsovací prkno A 3 (MARBURG)	00 - 76500
Přídavný úhelník pro A 3 i A 4	00 - 76510
Rýsovací fólie A4 po 1 kg (cca 260 listů)	HW - 74370
Rýsovací fólie A3 po 1 kg (cca 130 listů)	HW - 74380
Rýsovací fólie 27x34 cm po 1 kg (cca 200 listů)	HW - 74360
Bodátko s plochých držadlem	00 - 54101
Bodátko se sedlovým držadlem	HW - 54060
Rýsovací souprava	HW - 76300